

柄付ガーゼ X 黒

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止
- ・ X 線造影系部分を直接挟んで使用しないこと
(切断又は抜け落ちて体内に残存するおそれがあるため)

【形状・構造及び原理等】

- ・ 医療ガーゼと X 線造影材入りガーゼを積層して縫製し、柄（綿のテープ）を縫いつけた製品です。
- ・ 柄をつけない製品もあります。
- ・ ガーゼの材質：綿 100%
- ・ X 線造影材（黒線）の材質：
 - （固定材）塩化ビニル
 - （可塑剤）フタル酸ジ-2-エチルヘキシル
 - （造影剤）硫酸バリウム
 - （着色剤）カーボンブラック

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする、X 線で検知可能な成分を含有する器具をいう。

【使用方法等】

- (1) 適宜滅菌して使用する。
- (2) 滅菌は、高圧蒸気滅菌、EOG 滅菌ができる。

【使用上の注意】

- (1) 体内に留置しないこと。
- (2) 開封後は早めに使用すること。
- (3) 滅菌して使用する場合は、再滅菌しないこと。
- (4) 塩化ビニルの可塑剤が溶出する可能性があります。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社ツムラ
Tel 0725-55-2788