

## 滅菌柄付ガーゼ X 黒

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止
- ・ 再滅菌禁止
- ・ X 線造影糸部分を直接挟んで使用しないこと  
(切断又は抜け落ちて体内に残存するおそれがあるため)

### 【形状・構造及び原理等】

- ・ 医療ガーゼと X 線造影材入りガーゼを積層して縫製し、柄（綿のテープ）を縫いつけて滅菌した製品です。
- ・ 柄をつけない製品もあります。
- ・ ガーゼの材質：綿 100%
- ・ X 線造影材（黒線）の材質：
  - （固定材）塩化ビニル
  - （可塑剤）フタル酸ジ-2-エチルヘキシル
  - （造影剤）硫酸バリウム
  - （着色剤）カーボンブラック

### 【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする、X 線で検知可能な成分を含有する器具をいう。

### 【使用方法等】

適宜使用する。

### 【使用上の注意】

- (1) 体内に留置しないこと。
- (2) 開封後は早めに使用すること。
- (3) 塩化ビニルの可塑剤が溶出する可能性があります。

### 【保管方法及び有効期間等】

- (1) 保管方法  
直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- (2) 使用期限  
容器又は被包に表示。【自己認証（当社データ）による】

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社ツムラ  
Tel 0725-55-2788