

滅菌柄付ガーゼ X 青

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止
- ・ 再滅菌禁止
- ・ X 線造影糸部分を直接挟んで使用しないこと
(切断又は抜け落ちて体内に残存するおそれがあるため)

【形状・構造及び原理等】

- ・ 医療ガーゼと X 線造影材入りガーゼを積層して縫製し、柄（綿のテープ）を縫いつけて滅菌した製品です。
- ・ 柄をつけない製品もあります。
- ・ ガーゼの材質：綿 100%
- ・ X 線造影材（青線）の材質：
（固定材）ポリプロピレン、ポリエステル
（造影剤）硫酸バリウム
（着色剤）ウルトラマリンブルー グレード 02

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする、X 線で検知可能な成分を含有する器具をいう。

【使用方法等】

適宜使用する。

【使用上の注意】

- (1) 体内に留置しないこと。
- (2) 開封後は早めに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

- (1) 保管方法
直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- (2) 使用期限
容器又は被包に表示。【自己認証（当社データ）による】

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社ツムラ

Tel 0725-55-2788