


歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000

エンゼルチャモイス

【形状、構造及び原理等】

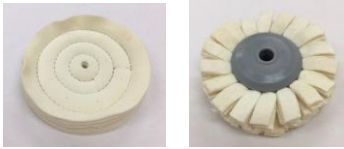

形状：ホイール状バフ。

原理：歯科技工用バフレーズ研磨機にて回転、接触させ歯科技工物を研磨する。

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる。

【使用方法等】

- 1) 本品を歯科技工用バフレーズ研磨機に取り付ける。
- 2) 歯科技工用バフレーズ研磨機を極低回転状態にて作動させた状態で、本品に艶出し用油脂研磨材等を適宜塗布する。
- 3) 任意の回転数にて回転、接触させ歯科技工物を研磨する。
- 4) 研磨作業の際は必ず使用する歯科技工用バフレーズ研磨機の操作手順に従うこと。

【使用上の注意】

- 1) 本品は記載の用途以外には使用しないこと。
- 2) 歯科医師、歯科技工士以外は使用しないこと。
- 3) 使用後は消防法、産業廃棄物処理法に従って処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

品質、性能等の劣化防止の為、湿気の少ない直射日光を避けた室温 40℃以下の場所で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

大栄歯科産業株式会社
電話：06-6441-3332