

歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000
マルチブルー

【形状、構造及び原理等】



概要：固形タイプの研磨材

原理：バフ・ブラシ等に本材を付着させて仕上げ研磨から艶出しを行う。

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨、艶出しに用いる。

【使用方法等】

バフ・ブラシ等に本材を付着させて、研磨を行います。

【使用上の注意】

- ・ 本材を使用して研磨する際には、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
- ・ 本材を使用して研磨する際には、目の損傷を防ぐために保護眼鏡等を使用すること。
- ・ 本材は【使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・ 本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 本材は、高温、多湿、直射日光、火気等を避けて、室温（1～30℃）で保管すること。
- ・ 本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

大榮歯科産業株式会社
電話：06－6441－3332