

歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000
エンゼルVポリッシュ

【形状、構造及び原理等】



概要：粉体の研磨材。

原理：バフ・ブラシ等に本材を付着させて粗仕上げから仕上げ研磨を行う。

【使用目的又は効果】

補綴物等の粗研磨から仕上げ研磨に用いる。

【使用方法等】

本材を適量の水と混合させ泥状にし、回転させたバフ・ブラシ等に付着させて研磨を行います。

【使用上の注意】

- ・本材使用時には防塵マスクや保護眼鏡、換気装置を使用して下さい。
- ・目に入った場合は十分に洗眼して目薬をさし、取れない時は眼科医の診察を受けて下さい。
- ・皮膚に付着した場合は肌荒れの原因となるので水洗いをして下さい。
- ・粉塵が舞うのでエアージェンでの除去はお止め下さい。
- ・万一吸入した場合は十分にうがいをして下さい。
- ・本材は【使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・本材は、高温、多湿、直射日光、火気等を避けて、室温（1～30℃）で保管すること。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

大榮歯科産業株式会社

電話：06-6441-3332