

医03 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN70976000
Guardian Glove ニトリル検査検診用グローブ

再使用禁止**【禁忌・禁止】**

再使用禁止

【寸法】

サイズ	SS	S	M	L
全長(mm)±5mm	235	235	240	240
掌幅(mm)±5mm	75	85	95	105

【形状・構造及び原理等】

本品は、アクリロニトリルブタジエンゴムを主原料とする、左右兼用タイプ使い捨て手袋である。パウダー無し、未滅菌である。

【使用目的又は効果】

手術を取り除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する。

【使用方法等】

個装箱のミシン目を丁寧に切り取り、開封口より手袋を取り出して装着する。

【使用上の注意】

- 爪先、刃物等、尖ったもの等に触れると破ったり、穴があくことがあるので注意すること。
- 包装が破損、汚損している場合、及び製品に破損、変形、ピンホール等の異常が認められた場合は使用しないこと。
- 薬品、溶剤等強い化学薬品に対して長時間直接使用しないこと。
- 開封後は、直射日光や強い人工光線を避け、エックス線機器等に近づけないこと。
- 色ムラがある場合でも、品質上の問題はない。
- かゆみ、かぶれ、発疹等の症状が現れた場合には使用を中止すること。また、その後の使用に際しては慎重を期すこと。
- 処分の際は、薬品との接触及び感染防止に留意すること。

【保管方法及び有効期間等】

1.貯蔵・保管方法

水濡れに注意し、高温、多湿な場所、及び直射日光、蛍光灯等の紫外線を避けて保管すること。

2.使用期限

使用の期限は包装に記載する(側面バーコード、EXP DATE)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:株式会社 つばさ

所在地:大阪市城東区古市1-13-21

お客様相談室 06-6923-8106