

カ ッ ト 綿

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用しないでください。
- 体内に留置しないししないでください。
- 滅菌して使用する場合は、高压蒸気滅菌、感熱滅菌、EOG 滅菌を使用してください。

【形状、構造等】

- 本品は綿 100%脱脂綿です。
- 本品は白色で臭い及び味はありません。

【使用目的、効能又は効果】

- 医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用するシート状の綿繊維からなる材料です。

【操作方法、使用方法等】

- 使用目的に応じて適宜使用してください。
- 創傷面については滅菌したものを使用してください。

【使用上の注意】

- 本品に異常がある場合は使用しないでください。
- 使用したものは医療用廃棄物として注意し処理してください。

【貯蔵・保管方法】

- 直射日光、水ぬれ、火気、及び高温・多湿をさげ清潔な場所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。

【包装】

- パッケージに内容物の重量を記載していません。

【製造販売業者及び製造業者等】

製造販売業者：テイメン株式会社

岡山県倉敷市連島町連 110-35

TEL 086-444-5155

製造業者：テイメン株式会社

