

機械器具 56 採血又は輸血用器具
一般医療機器 真空採血管用ホルダ (JMDNコード：70364000)

ベノジェクトⅡホルダー

再使用禁止

【禁忌・禁止】


<使用方法>

1. 再使用禁止、再滅菌禁止
2. 本品専用の耐圧性能を有するゴムスリーブ付採血用針と単回使用ホルダ (本品) の組み合わせ以外は使用しないこと。
[血液付着による交差感染の可能性がある。]
3. 滅菌済み真空採血管以外の採血管を使用しないこと。
4. 採血終了後、採血管に採血用針が刺さったままの状態で駆血帯を外さないこと。[駆血帯を外すことによる圧力の変動により、採血管内の内容物等が患者の体内に逆流する可能性がある。]
5. ホルダは患者ごとに使用し、使用後は廃棄すること。[ホルダに血液が付着した場合、交差感染の可能性がある。]


【形状・構造及び原理等】

<構造図 (代表図) >

本品は針脱着が可能なベノジェクトⅡホルダーD (以下、Dタイプ) と針脱着ができないベノジェクトⅡホルダーSD (以下、SDタイプ) がある。

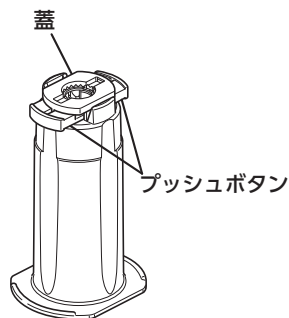

ベノジェクトⅡホルダー D

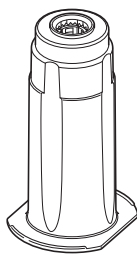

ベノジェクトⅡホルダー SD

【使用目的又は効果】

<使用目的>

真空採血システムの一構成をなすものであり、採血針等を穿刺する際に、固定及び安定化させる用具である。採血針を嵌合し、固定した後、当該ホルダ内に真空採血管を挿入することによって、採血が開始される。


** 【使用方法等】

本品は、専用採血用針ベノジェクトⅡ採血針S (医療機器認証番号：20700BZZ00542000)、ベノジェクトⅡルアーアダプターS (医療機器認証番号：20900BZZ00017000) と併用して使用する。なお、シユアシールド翼付採血セット (医療機器承認番号：21300BZZ00515000) とも適合することが確認されている。

1. 採血用針を本品にまっすぐ完全に挿入し、確実に固定する。
2. 駆血帯を装着後、穿刺部位を消毒する。
3. 静脈の走行に沿って本品に装着した採血用針を血管に穿刺する。
4. 真空採血管を本品にまっすぐ完全に押し込み、採血する。

** 5. 規定の量の血液が採れるまで、この状態を保つこと (図1)。

図 1

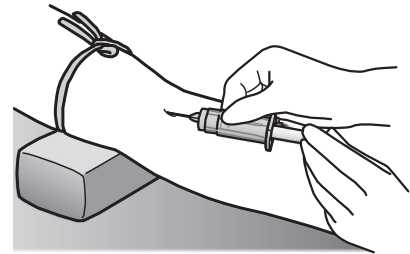

6. 採血の血流が停止したら、直ちに本品から採血管を外す。
7. 連続採血する場合は、本品を固定したまま、採血管を取り替える。
8. 採血終了後、本品から採血管を抜去した後に駆血帯を外す。
9. 採血用針を血管から抜去し、止血する。

** 10. 本品に採血用針を装着したまま廃棄する。

Dタイプの場合

** 針先を下に向け、プッシュボタンを押し、採血用針を取り外し、廃棄することもできる。

SDタイプの場合

そのまま廃棄する。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 本品への採血用針の固定は確実にすること。[採血用針が使用中に外れる可能性がある。]
2. あらかじめ嵌合部に緩みがないことを確認してから使用すること。
3. 採血管内に血液が流入しない場合は、以下の操作を行うこと。
 - (1) 採血用針が採血管の栓を完全に貫通するよう、再度採血管を押し込む。
 - (2) 血管内に針先が確保されているか確認する。
 - (3) (1)(2)の操作を行っても血液が流れない場合は、採血管を抜去し、新しい採血管と交換する。
 - (4) それでも血流がない場合は、採血用針を抜去し廃棄した後、新しい採血用針で穿刺をやり直す。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

1. 使用中は本品の破損、嵌合部の緩み及び血液漏れ等について、定期的に確認すること。
2. 採血用針を本品に装着する際、及び装着した後、針がぐらつくなど嵌合が緩い場合は、新しい採血用針及び本品と交換すること。[採血管を挿入する際は、採血用針が外れたり、採血できない可能性がある。]
3. Dタイプのプッシュボタン操作時に、柔らかい、固いなどの違和感を感じた場合は、新しい採血用針及び本品と交換すること。[採血管を挿入する際は、採血用針が外れたり、採血できない可能性がある。]
4. 採血用針を本品に装着した後、本品内に指を入れないこと。[針刺し、感染の可能性がある。]
5. 本品内に血液漏れが生じた場合は、採血用針を直ちに血管から抜去し、新しい採血用針及び本品と交換すること。[ゴム栓タイプの採血管を多数使用した場合、採血用針のゴムスリーブが正常に戻らず、血液が漏れる可能性がある。]

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：テルモ株式会社

電 話 番 号：0120-12-8195 テルモ・コールセンター

