

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 カテーテルコネクタ（JMDNコード：32339000）

サフィードコネクター

（コネクター100）

再使用禁止

- * **【禁忌・禁止】**
 - <使用方法>
- * 再使用禁止、再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

<構造図>



【使用目的又は効果】

<使用目的>

本品は各種チューブ、カテーテル等の連結に使用する。

【使用方法等】

1. 汚染に十分注意し、本品を包装から取り出す。
2. コネクターのオス側にチューブ・カテーテル等を、コネクターのメス側にシリンジを確実に接続する。
適合チューブ内径：3.8～6.5mm（オス側）
適合シリンジ：スリップチップ（メス側）

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

チューブ・カテーテル等の接続が不十分な場合は、抜けることがあるので確実に接続すること。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

<有効期間>

使用期限は外箱に記載（自己認証による）

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：テルモ株式会社

電話番号：0120-12-8195 テルモ・コールセンター

** 外国製造業者：泰尔茂医療産品（杭州）有限公司

Terumo Medical Products (Hangzhou) Co., Ltd.

** 国 名：中華人民共和国

