

機械器具 48 注射筒
一般医療機器 注射筒キャップ（JMDN コード：16825000）

カテーテルチップシリンジ用キャップ


再使用禁止

*【禁忌・禁止】

*再使用禁止、再滅菌禁止

*【形状・構造及び原理等】

<構造図>

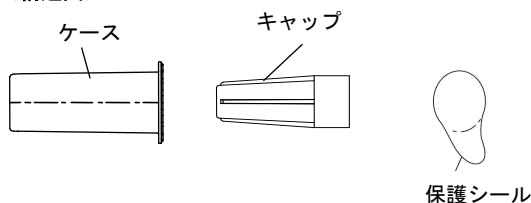

<原理>

*本品はカテーテルチップ型シリンジのカテーテルチップ部分にかぶせることによりチップ部分を保護するキャップである。

【使用目的又は効果】

<使用目的>

本品は、カテーテルチップ型のシリンジに用いるキャップである。

【使用方法等】

1. 保護シールを開封する。
2. ケースごとカテーテルチップ型シリンジに確実に接続させる。
3. ケースを引き抜き使用する。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- (1) ケース引き抜き時、強くつままないこと。〔本品と一緒に抜ける可能性がある。〕
- (2) あらかじめ接続部に緩みがないことを確認してから使用すること。
- (3) 本品に衝撃を与えないこと。〔破損する可能性がある。〕
- (4) 本品接続時は、以下の事項を順守すること。
 - ① 過度な締め付けをしないこと。〔カテーテルチップ型シリンジの筒先に破損が生じ、液漏れ、空気の混入を引き起こす可能性がある。〕
 - ② 接続部分に薬液を付着させないこと。〔接続部の緩み等が生じ、液漏れ、空気の混入を引き起こす可能性がある。〕
 - ③ 横方向の力を加えないこと。〔筒先に曲がりや破損が生じ、液漏れ、空気の混入を引き起こす可能性がある。〕

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- (1) 使用中は本品の破損、接続部の緩み及びカテーテルチップ型シリンジからの薬液漏れ等について、定期的に確認すること。
- (2) 本品を鉗子等でつまんで傷をつけないこと。〔破損が生じ、カテーテルチップ型シリンジからの液漏れ、空気の混入を引き起こす可能性がある。〕
- (3) 本品は、菌の繁殖防止及び筒内薬液の効力低下に有効なものではない。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

<有効期間>

使用期限は外箱に記載（自己認証による）

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：テルモ株式会社

*電 話 番 号：0120-12-8195 テルモ・コールセンター

