

機械器具 56 採血又は輸血用器具
一般医療機器 ルアーアダプタ（JMDN コード：35075000）

テルフュージョン[®]ロックコネクター


再使用禁止

*【禁忌・禁止】

*再使用禁止、再滅菌禁止

*【形状・構造及び原理等】

<構造図（代表図）>

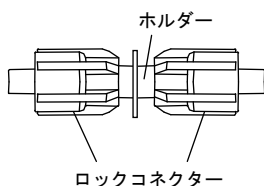

*血液・体液に接触する部分の原材料一覧

部品名	原材料
ホルダー	ポリカーボネート

<原理>

*本品は、両側にオスルアーコネクターを有するアダプタであり、メスコネクターと他のメスコネクターとの連結を行い、輸液ライン等を延長する際に使用する器具である。

【使用目的又は効果】

<使用目的>

本品は三方活栓のメスコネクターと他のメスコネクター等との連結を行うために使用する。

【使用方法等】

三方活栓のメスコネクターと他のメスコネクター等とを連結する。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- (1) あらかじめ接続部に緩みがないことを確認してから使用すること。
- (2) 本品が身体の下等に挟まれないように注意すること。[チューブの折れ、閉塞、部品の破損等が生じる可能性がある。]
- (3) 他の医療機器と接続する場合は、過度な締め付けをしないこと。[コネクターが外れなくなる、又はコネクターが破損する可能性がある。]
- (4) テーパー部分に薬液を付着させないこと。[接続部の緩み等が生じる可能性がある。]

*【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- (1) 使用中は本品の破損、接続部の緩み及び薬液漏れ等について、定期的に確認すること。
- * (2) 血管造影剤等の高压注入には使用しないこと。 [液漏れ又は破損する可能性がある。]
- (3) ロックコネクターとポリ塩化ビニル製のメスコネクターを接続する場合は注意すること。[外れなくなる可能性がある。]

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

<有効期間>

使用期限は外箱に記載（自己認証による）

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：テルモ株式会社

*電 話 番 号：0120-12-8195 テルモ・コールセンター

