

医療用品 4 整形用品
一般医療機器 液体包帯（JMDN コード：33584000）

ジェルクレア口腔用液

【禁忌・禁止】

本品の成分に対してアレルギーを起こしたことがある方は、使用しないでください。[アナフィラキシーショック等のおそれがあります。]

【形状・構造及び原理等】

＜構造図＞



袋：内容量 15m L

＜製品概要＞

本品は、粘性のある液体です。本品を水と混ぜて口に含む、又は原液を塗ることにより、口腔粘膜上に物理的な保護膜を形成して、口内炎を保護します。口内炎への刺激性を考慮し、本品にはエタノールは含んでいません。

＜成分＞

水、ポリビニルピロリドン、マルトデキストリン、プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 40、ヒドロキシエチルセルロース、香料、エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム二水和物、ヒアルロン酸ナトリウム、サッカリンナトリウム二水和物、グリチルレチン酸、ソルビン酸カリウム、安息香酸ナトリウム、ベンザルコニウム塩化物

【使用目的又は効果】

＜使用目的＞

本品は、口腔粘膜上に膜を形成して、口内炎を保護します。

【使用方法等】

1 回 1 袋を 1 日 3 回まで、又は必要に応じて下記のように使用してください。

- (1) 本品 1 袋をコップ等に出してください。
- (2) 本品に水を 40mL 加え、スプーン等でよくかき混ぜてください。
- (3) 薄めた液を口に含み、口の中全体に液体が触れるよう 1 分以上すすいでいきわたらせてから吐き出してください。
- (4) 吐き出した後は、30～60 分間飲食を控えてください。
[吐き出した後 30～60 分経過することで、形成された保護膜がはがれにくくなります。]

なお、口の中をすすぐことができない方（小児等）は、本品を原液のままスポンジブラシ等で直接患部に塗ってください。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- ・本品は飲み込まないでください。
- ・本品使用後は、うがいをしたり、口をゆすいだりしないでください。
- ・余った液は廃棄してください。
- ・口の中を清潔にしてから使用してください。
- ・7 日間使用しても変化が認められない場合は、医師に相談してください。
- ・連続して 4 週間を超えて使用しないでください。

【使用上の注意】

＜相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）＞

【併用注意（併用に注意すること）】

口腔内に使用する医薬品等と併用した場合、その医薬品等の効果が低下する可能性があります。

＜不具合・有害事象＞

【その他の有害事象】

本品の使用中に、口腔内違和感（不快感）があらわれることがあります。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところで保管してください。

小児の手の届かないところに保管してください。

＜有効期間＞

使用期限は外箱に記載（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：テルモ株式会社

電 話 番 号：0120-12-8195 テルモ・コールセンター

外国製造業者：ヘルシン・ヘルスケア SA

Helsinn Healthcare SA

国 名：スイス

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

TERUMO