


キャプディールTSCD交換キット

再使用禁止

- * **【禁忌・禁止】**
＜使用方法＞
* 再使用禁止、再滅菌禁止

- * **【形状・構造及び原理等】**
＜構造図（代表図）＞

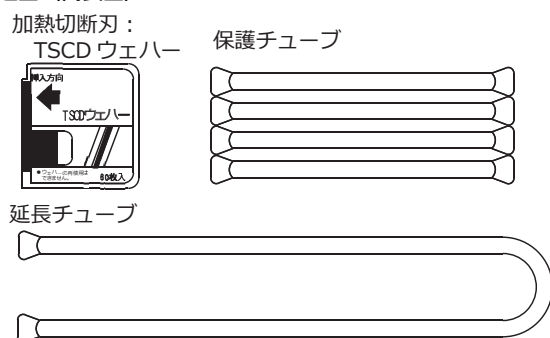

構成部品	内容
加熱切断刃：TSCDウェハー（カセット入）	60枚／カセット
保護チューブ	10cm・4本／袋
延長チューブ	45cm・1本／袋
延長チューブ（緑色仕様）	45cm・1本／袋

本品は上表の部品単品又は適宜組合せである。具体的な構成は外箱に表示。

- * ＜血液・体液に接触する部分の原材料＞
保護チューブ、延長チューブ：
ポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジ（2-エチルヘキシル））

【使用目的又は効果】

＜使用目的＞

本品は、腹膜灌流時に次の用途に使用する。

1. 加熱切断刃（ウェハー）
指定の無菌接合装置を用いて腹膜灌流液交換の際に、接続部分にあたるチューブを無菌的に接合する際の加熱切断刃として使用する。
2. 保護チューブ
腹膜灌流液交換の際に、チューブ切り離し部分を無菌的に密封するために使用する。
3. 延長チューブ
腹膜灌流液の注入又は排出を行うための接続チューブの延長チューブとして使用する。

**【使用方法等】

- ** 本品は「テルモ無菌接合装置TSCD SC-102（医療機器届出番号：13B1X00101000049）」又は「むきんイージー（医療機器届出番号：13B1X00101000088）」と併用して使用する。
1. TSCDウェハーの充填されたカセットを装置のウェハーカセット挿入部に挿入する。
 2. チューブを所定の位置にセットする。
 3. 装置の使用手順に沿って、チューブを無菌接合する。
 4. カセット内のTSCDウェハーが無くなった場合、空のカセットを取り出し、カセットを交換する。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1. 接合後、直ちに開通させ接合部に穴あき又は液漏れ等の接合不良が発生していないことを確認すること。[接合不良の状態のまま通液したり、再接合すると、腹膜炎を併発する可能性がある。]
2. 接合部に穴あき又は液漏れ等の接合不良が発生した場合は、直ちに使用を中止すること。また、接合不良が発生した場合は、直ちにキャプディールTSCDトランスファーチューブセットを交換すること。[接合不良の状態のまま使用すると、腹膜炎を併発する可能性がある。]

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. チューブの束ね、固定にはテープを使用しないこと。[テープ糊が付着した部分を接合すると、接合不良を起こし、腹膜炎を併発する可能性がある。]
2. チューブ表面に入浴パック等の糊や、皮膚保護剤、保湿剤、ハンドクリーム、整髪料等が付着しないよう注意すること。[接合不良を起こし、腹膜炎を併発する可能性がある。]
3. チューブは、軟らかいプラスチック製なので、鋭利なもの等で傷つけないこと。[チューブに液漏れ、空気混入、破断が生じ、腹膜炎を併発する可能性がある。]
4. チューブにアルコール等の溶剤を接触させないこと。[ポリ塩化ビニルの可塑剤が溶出し、チューブが硬化する可能性がある。]
5. 接合不良が発生した場合は、速やかに医療機関に連絡するよう患者に指導すること。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

＜有効期間＞

使用期限は外箱に記載（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：テルモ株式会社

電話番号：0120-12-8195 テルモ・コールセンター

取扱説明書を必ずご参照ください。

