

高度管理医療機器 機械器具 7 内臓機能代用器
自動腹膜灌流装置用回路及び関連用具セット（JMDNコード：70590000）

APDきりはなし用キャップセット


再使用禁止

- ** **【禁忌・禁止】**
 <使用方法>
 ** 再使用禁止、再滅菌禁止

** **【形状・構造及び原理等】**

<構造図>

回路キャップ

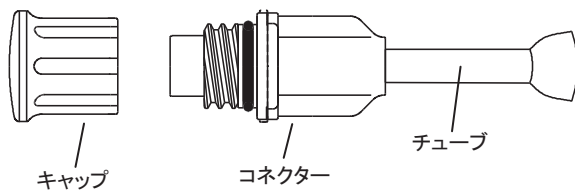

構成内容

構成部品	数量
回路キャップ	1個
マスク	1枚

** <血液、体液に接触する部分の原材料>

チューブ：ポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジ（2-エチルヘキシル））

コネクター：ポリカーボネート樹脂

* **【使用目的又は効果】**

<使用目的>

本品は腹膜透析液の交換を自動的に行う際に、注液・排液用器具と接続チューブをきりはなし場合に、接続部を保護するために使用する。

** **【使用方法等】**

<組み合わせ可能な医療機器>

APD装置	販売名 マイホームびこ 医療機器承認番号 21300BZZ00199000
APD回路	販売名 マイホームびこセット 医療機器承認番号 21300BZZ00195000

1. 本品を包装から取り出し、マスクを付け、APD装置を一時停止させる。
2. APD回路の腹膜ラインのクランプと「キャプディールトランスファータブセット（医療機器承認番号 16200BZZ00326000）」のクランプを閉じ、腹膜ラインとキャプディールトランスファータブセットを切り離す。
3. キャプディールトランスファータブセットのチューブジョイントに「キャプディール保護キャップセット（医療機器承認番号 22400BZX00243000）」の保護キャップを付ける。
4. 腹膜ラインのコネクターに回路キャップを取り付ける。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

1. キャップを外した回路キャップを上に向けないこと。[落下菌が侵入し、腹膜炎を併発する可能性がある。]
2. コネクターの内側を指等で触れないこと。接続部を不潔にした場合は、直ちに本品を交換すること。[腹膜炎を併発する可能性がある。]
3. チューブは、軟らかいプラスチック製のため、鋭利なもの等で傷つけないこと。[チューブに液漏れ、空気の混入、破断が生じ、腹膜炎を併発する可能性がある。]
4. チューブは、過度に引っ張るような負荷や押し込むような負荷、チューブを折り曲げるような負荷を加えないこと。[チューブが破損する可能性がある。]

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

<有効期間>

使用期限は外箱に記載（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：テルモ株式会社

電話番号：0120-12-8195 テルモ・コールセンター

取扱説明書を必ずご参照ください。

TERUMO