


腹腔内洗浄用チューブ

再使用禁止

- ** **【禁忌・禁止】**
＜使用方法＞
** 再使用禁止、再滅菌禁止

- ** **【形状・構造及び原理等】**
* ＜構造図＞

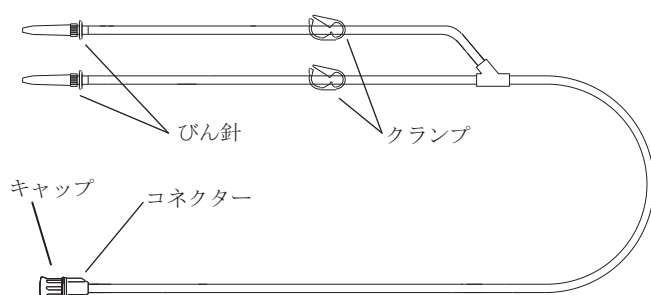

- ** ＜血液、体液に接触する部分の原材料＞

チューブ：ポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジ（2-エチルヘキシル））

コネクター：ポリカーボネート樹脂

びん針：ABS樹脂

- * **【使用目的又は効果】**

＜使用目的＞

本品は連続携行式腹膜灌流（CAPD）を行う際に、腹腔内を洗浄するため、生理食塩液入り容器とCAPD用接続チューブを連結し、腹腔内に生理食塩液を注入するための器具である。

- ** **【使用方法等】**


本品のコネクターを「キャブディールトランスファーチューブセット（医療機器承認番号：16200BZZ00326000）」又は「キャブディールTSCDトランスファーチューブセット（医療機器承認番号：20600BZZ00239000）」に、びん針は生理食塩液入り容器に接続し、腹腔内に生理食塩液を注入する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. キャップを外したコネクターを上に向けないこと。[落下菌が侵入し、腹膜炎を併発する可能性がある。]
2. コネクターの内側やびん針を指等で触れないこと。接続部を不潔にした場合は、直ちに本品を交換すること。[腹膜炎を併発する可能性がある。]
3. チューブは、軟らかいプラスチック製のため、鋭利なもの等で傷つけないこと。[チューブに液漏れ、空気の混入、破断が生じ、腹膜炎を併発する可能性がある。]

4. チューブ及びチューブと接合している箇所は、過度に引っ張るような負荷や押し込むような負荷、チューブを折り曲げるような負荷を加えないこと。[チューブが破損する、又は接合部から抜ける可能性がある。]
5. クランプを閉じる際は、下図のように正しく閉じること。[チューブの一部が閉塞されず、気密性が保たれない可能性がある。]

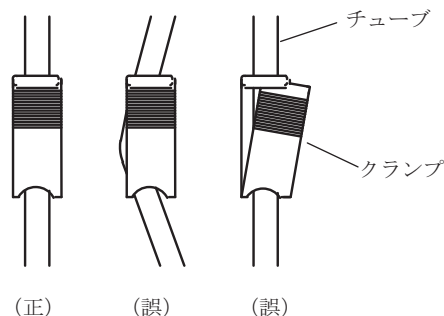

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

＜有効期間＞

使用期限は外箱に記載（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：テルモ株式会社

電話番号：0120-12-8195 テルモ・コールセンター

取扱説明書を必ずご参照ください。

TERUMO