

# キャプディール保護キャップセット

再使用禁止

## 【禁忌・禁止】

<使用方法>

再使用禁止、再滅菌禁止

<適用対象(患者)>

ポピドンヨード又はヨウ素に対し過敏症の既往歴のある患者

## 【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

1. 保護キャップの内側を上に向けないこと。[落下菌が侵入し、腹膜炎を併発する可能性がある。]
2. 保護キャップの内側を指等で触れないこと。保護キャップの内側を不潔にした場合は、直ちに保護キャップを交換すること。[腹膜炎を併発する可能性がある。]

## 【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

<有効期間>

使用期限は外箱に記載 (自己認証による)


## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：テルモ株式会社


電話番号：0120-12-8195 テルモ・コールセンター

## \*\*【形状・構造及び原理等】


\*\* <構造図(代表図)>

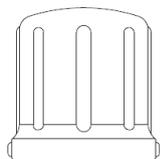

保護キャップ

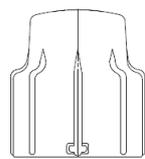

保護キャップ(スリムタイプ)

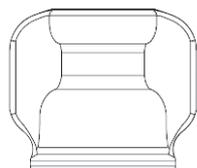

保護キャップ(ウイングタイプ)

保護キャップにはポピドンヨードを含浸させたスポンジが挿入されている。

品種構成

コード番号	構成品
CD-PX07	保護キャップ、マスク
CD-PX07S	保護キャップ(スリムタイプ)、マスク
CD-PX10W	保護キャップ(ウイングタイプ)、マスク

\* <血液、体液に接触する部分の原材料>

保護キャップ：ポリプロピレン

Oリング：シリコーンゴム

スポンジ：ウレタン樹脂

## 【使用目的又は効果】

<使用目的>

本品は連続携行式腹膜灌流 (CAPD) を行う際、腹腔内へ灌流液を注入後、注入口を密封するために使用する。

## 【使用方法等】

本品は腹膜透析液の注排液時以外に「キャプディールトランスファチューブセット (医療機器承認番号 16200BZZ00326000)」のチューブジョイントに接続して使用する。

取扱説明書を必ずご参照ください。

**TERUMO**