

機械器具 42 医療用剥離子
管理医療機器 単回使用臓器固定用圧子（JMDNコード：70954000）

スーチャーインサート

再使用禁止


【禁忌・禁止】

<使用方法>

再使用禁止、再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

<構造図>

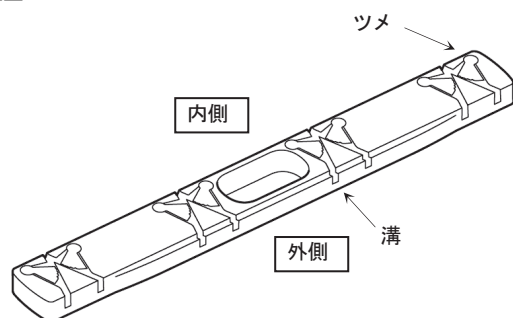

<原理>

本品は、心臓外科手術の際に縫合糸等を一時的に保持するために用いる。専用の開創器（以下、リトラクター）に取り付けて使用する。単回使用である。

【使用目的又は効果】

<使用目的>

臓器を固定又は保持するために用いる。

【使用方法等】

本品は以下の医療機器（別売品）と併用して使用できる。

販売名	届出番号	製造販売業者
スターナルリトラクター	13B1X00101000072	テルモ 株式会社
Apollo スターナルリトラクター	13B1X00078150002	泉工医科貿易 株式会社

<使用方法>

1. 本品を無菌的に取り出す。
2. 左右のスーチャーインサートをリトラクターのスロットに取り付ける（図1）。

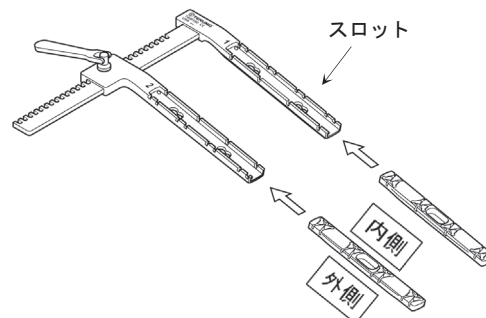


図1 リトラクターへの取り付け

3. 縫合糸を前側から本体の溝に通し、後ろ側に縫合糸を引いて固定する。縫合糸の張力を強めたい場合は、縫合糸をさらに後ろに引くこと。

注意：縫合糸に過度の張力をかけないこと。

注意：一つの溝に、二つ以上の縫合糸をかけないこと。

4. 縫合糸を本品から外す場合は、縫合糸を一度後ろ側に引いてから上方に引き上げる。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

<有効期間>

使用期限は個包装に記載（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：テルモ株式会社

電話番号：0120-12-8195 テルモ・コールセンター

外国製造業者：テルモカーディオバスキュラーシステムズ
コーポレーション

Terumo Cardiovascular Systems Corporation

国 名：アメリカ合衆国

