

機械器具（16）体温計
管理医療機器 電子体温計（JMDN コード：14032010）

「テルモ電子体温計 S 1 0 0」の付属品

テルモ電子体温計 S100 Setting

【形状・構造及び原理等】

＜原理＞

本品は、Bluetooth®通信機能を有する汎用モバイル機器にインストールされ、テルモ電子体温計 S100（以下、本体）と通信することで、本体設定の取得・変更を行う。

【使用目的又は効果】

＜使用目的＞

本品は以下に示す本体設定を取得・変更する目的で用いる。

- （1）表示の明るさ
- （2）体温値表示の色
- （3）日時

なお、本体のテルモ電子体温計 S100 は、測温部を部位に接触させて、腋窩の体温を測定し、最高温度を保持しデジタル表示するものである。

【使用方法等】

【使用環境】

本品と併用可能な汎用モバイル機器

- ・ Bluetooth 通信機能を備え、Android™ 9 以降が動作している汎用モバイル機器
- ・ Bluetooth 通信機能を備え、iOS® 13 以降が動作している汎用モバイル機器

または、上記と同等品で動作が確認できた汎用モバイル機器

本品の最新対応 OS 及び汎用モバイル機器については、取扱説明書に記載のウェブサイトを確認すること。

【使用方法】

1. 初回設定

- （1）本体の取扱説明書に記載のウェブサイトより、本品を汎用モバイル機器へダウンロード（インストール）する。
- （2）本体の取扱説明書に従い、汎用モバイル機器と本体をペアリングする。

2. 本体設定の取得・変更

- （1）本体の取扱説明書に従い、本体の電源を入れる。
- （2）本品を起動する。
本体との接続が自動的に行われる。接続されない場合は本品の接続ボタンを押す。本品と本体が接続されると、本体設定情報が取得・表示される。また、汎用モバイル機器の日時にあわせて、本体の日時が自動的に設定される。
- （3）本品の表示に従い、本体設定を変更する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- （1）測定結果の自己診断、治療は行わないこと。[自己診断、治療は危険である。]
- （2）汎用モバイル機器の OS バージョンアップを実施する前に、本品の最新対応 OS 及び汎用モバイル機器について、取扱説明書に記載のウェブサイトを確認すること。[モバイル機器が本品の使用条件に合致していないと、本品が正常に起動及び作動しないことがある。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：テルモ株式会社

電話 番 号：0120-008-178 テルモ・コールセンター

外国製造業者：鴻富錦精密電子(煙台)有限公司

Hong Fu Jin Precision Electronics (Yantai) Co.,Ltd

国名：中華人民共和国

取扱説明書を必ずご参照ください。

