


BC ORIGINAL ピンセット（コーク型）

【禁忌・禁止】

- (1) 器具の形態変更や改造等はないこと。[事故・破損等の原因になります。]
- (2) 電気メスを用いた接触凝固は、併用しないこと。[術者が感電、火傷をする危険性がある。また、器械の表面を損傷する]
- (3) 本品を直接火炎にさらさないこと。[事故・破損の原因になります]

【形状・構造及び原理等】

本品の材質は、ステンレス鋼である。

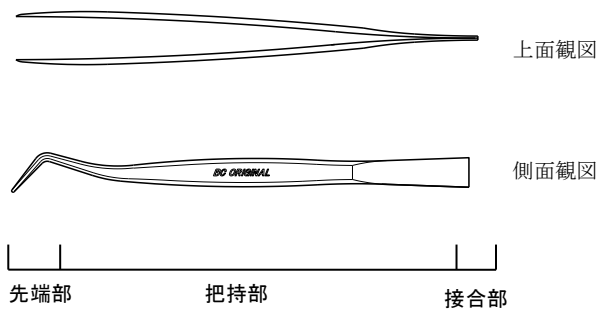

〈原理等〉

本品は 2 つの先細のバネ性先端部をもつ。この先端部を近接させて(閉じて)、対象物の保持・輸送を行う。

【使用目的又は効果】

口腔内に適用する創傷被覆・保護材を把持する。

【使用方法等】

〈使用方法〉

- (1) 創傷被覆・保護材を把持し、口腔内に適用する。
- (2) 本品の使用は通法に基づき行うこと。

【使用上の注意】

〈使用注意〉

- (1) 器具の正しい使用のため、添付文書の注意・指示事項に従うこと。
- (2) 使用前に必ず洗浄・滅菌（保守・点検に係る事項参照）をすること。
- (3) 使用目的以外の目的で使用しないこと。また、折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力（応力）を加えないこと。
- (4) 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないうちに、直ちに洗浄液等に浸漬すること。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

- (1) 貯蔵・保管にあたっては、洗浄をした後、変色・腐食を防ぐために保管期間の長短にかかわらず必ず乾燥をすること。
- (2) 滅菌済みのものを貯蔵・保管するにあたっては、再汚染を防ぐため清潔な場所に保管すること。
- (3) 本品は、歯科従事者以外には触れないように適切な保管・管理をすること。

〈耐用期間〉

製造出荷後、正規の保守点検を行った場合に限り、1 年とする。
[自己認証（当社データ）による]

【保守・点検に係る事項】

- (1) 使用（滅菌）前に、汚れ、傷、曲がり、錆び、変色、及び先端の損傷等に異常がないか点検すること。
- (2) 精製水以外での洗浄は、器具を腐食させるおそれがあるため、使用を避けること。
- (3) 通法に従い、必ず滅菌を行うこと（オートクレーブ可）。オートクレーブの際は、精製水を使用すること。
- (4) 金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は、器具の表面が損傷するので汚物除去及び洗浄時に使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者

株式会社デンテック

〒174-0053 東京都板橋区清水町 5 3-5

TEL：03-3964-2011

FAX：03-3962-5624

2. 外国製造業者

AKMO Instruments（アクモ インストルメンツ）

パキスタン・イスラム共和国