


機械器具 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用充填器（70680000）
ジーシー ヒートカッター

【形状・構造及び原理等】

本品の材質は、ステンレス鋼である。

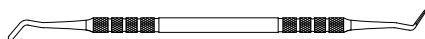

【使用目的又は効果】

[使用目的]

○歯科用ガッタパーチャポイントの加熱切断器具。

[性能・効果]

○充填されたガッタパーチャの余剰部を加熱した“ヒートカッター”にて切断・除去する事が可能。

【使用方法等】

[使用方法]

○インスツルメント先端を加熱して、充填された歯科用ガッタパーチャの切断・除去を行う。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) 加熱の際は、長時間火炎にさらさないこと。
- 2) 必要以上の加熱を行わないこと。
- 3) 加熱したインスツルメントは、高温になっているため口腔内外とも取り扱いに十分に注意すること。
- 4) 本品は、長期間使用により鋼材の疲労・磨耗等で耐久性の低下が生じますので、適時交換すること。
- 5) 本品を絶対に細工加工しないこと。事故・破損等の原因になります。
- 6) 本品は、必ず使用前に傷・バリ等がないことを確認すること。
- 7) 本品は、先端が非常に鋭利な為、使用の際には充分注意すること。
- 8) 本品はステンレス製のため、汚れ除去時にはワイヤーブラシ・ヤスリ等の鋼製工具を使用しないこと。サビの発生・破損・性能・品質等の低下となります。

【使用上の注意】

- 1) 重要な基本的注意
 - ①器具の正しい使用のため、添付文書の注意・指示事項に従うこと。
 - ②器具の形態変更や改造等はしないこと。
 - ③製品の仕様は改良のため、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
 - ④本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
 - ⑤歯科治療以外の目的で使用しないこと。また、折損・曲がりなどの原因になり得るので、使用時に必要以上の力を加えないこと。
 - ⑥電気メスを用いた接触凝固は、術者が感電、火傷をする危険性があり、また器具の表面を損傷するので併用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ①錆びる恐れがあるため、水分が付着したまま保管しない。
- ②本品はステンレス製ですが、湿度の高い場所に長時間放置すると錆びてしまう恐れがあるので、湿度が低く、清潔な場所に保管する。
- ③本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。
- ④金属たわし、クレンザー（磨き粉）などは、器具の表面が損傷するので、汚物除去及び洗浄時に使用しない。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 : 株式会社デンテック
住所 : 〒174-0053
東京都板橋区清水町 53 番 5 号
電話番号 : 03-3964-2011

発売元 : 株式会社ジーシー
住所 : 〒113-0033
東京都文京区本郷 3 丁目 2 番 14 号
電話番号 : (お客様窓口) 0120-416480