

機械器具 6 5 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用充填器（70680000）

ジーシー フィリングインスツルメント

【形状・構造及び原理等】

1) 形状



2) 材質

- ・ステンレス

【使用目的又は効果】

歯科用セメント、歯科用充填用コンポジットレジン、歯科用支台築造材料、歯科用小窩裂溝封鎖材、歯科用裏層材料、歯科用覆髄材料、歯科用仮封材等の歯科材料又は覆罩剤等の歯科用医薬品を歯牙に充填、塗布するため等に用いる再使用可能な手用器具をいう。ただし「歯科用圧入充填器」に該当するものを除く。

【使用方法等】

- 1) 購入時は未滅菌の為、使用前に必ず洗浄・滅菌を行い、次回からの使用時にも同様に行います。
オートクレーブ可 121℃で 20 分間
- 2) 練和ペーストを先端に少量採取し、窩洞に流入、修復します。
- 3) インスツルメント先端は、平滑な面とその周囲にエッジを持つため、填入したペーストとインスツルメントの切れがスムーズに行えます。
- 4) 充填は、積層するようにペーストをインスツルメントの先端で窩洞内におき、修復部分にペーストを誘導するように塗布、填塞します。インスツルメントの先端は、ペーストを適量採取出来るように、採取前に綿花、ガーゼなどで清拭しておきます。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) 本品を直接火炎にさらさないこと。
- 2) 本品は、長時間使用により鋼材の疲労・磨耗等で耐久性の低下が生じるので、適時交換すること。
- 3) 事故・破損などの原因になるので、細工加工は行わないこと。
- 4) 本品は、必ず使用前に傷・バリ等がないことを確認する事。
- 5) 本品は、先端が非常に鋭利な為、使用の際には充分注意すること。
- 6) 汚れ除去時には、ワイヤーブラシ・ヤスリ等の鋼製工具を使用しないこと。（錆の発生・破損・性能・品質などの低下に繋がります。）

【使用上の注意】

- 1) 重要な基本的注意
 - ①器具の正しい使用のため、添付文書の注意・指示事項に従うこと。
 - ②インスツルメントの劣化の恐れがあるので、滅菌器の温度を 175℃以上に上昇させないこと。
 - ③本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
 - ④歯科治療以外の目的で使用しないこと。また、折損・曲がりなどの原因になり得るので、使用時に必要以上の力を加えないこと。
 - ⑤電気メスをを用いた接触凝固は、術者が感電、火傷をする危険性があり、また器具の表面を損傷するので併用しないこと。
 - ⑥乾熱滅菌は、高温になり劣化の原因になるので使用しないこと。

- ⑦ 本品の消毒用薬液は、防錆効果のある次のものを推奨します。その際、使用方法是各薬液の指示に従うこと。

- ・グルタラル製剤（例：ハイドリット）
- ・グルコン酸クロルヘキシジン（例：ヒビテン）
- ・界面活性剤系薬液（例：塩化ベンゼトニウム液、塩化ベンザルニコウム液）

- ⑧ 次の成分を含む消毒用薬液は、使用しないこと。

- ・塩素系薬液（次亜塩素酸ナトリウム等）
- ・過酸化水素系薬液（オキシドール等）
- ・強酸性水

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・錆びる恐れがあるため、水分が付着したまま保管しないこと。
- ・本品はステンレス製であるが、湿度の高い場所に長時間放置しますと錆びてしまう恐れがあるので、湿度が低く、清潔な場所に保管すること。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 : 株式会社デンテック

住所 : 〒174-0053
東京都板橋区清水町 53-5

発売元 : 株式会社ジーシー

住所 : 〒113-0033
東京都文京区本郷 3 丁目 2 番 14 号

電話番号 : (お客様窓口) 0120-416480