

一般医療機器


*機械器具(36) 医療用ピンセット
歯科治療用ピンセット JMDNコード：31814000
正宗ピンセット（コーク型）

【禁忌・禁止】

- (1) 器具の形態変更や改造等はしないこと。[事故・破損等の原因になります。]
- (2) 電気メスを用いた接触凝固は、併用しないこと。[術者が感電、火傷をする危険性がある。また、器械の表面を損傷する]
- (3) 本品を直接火炎にさらさないこと。[事故・破損の原因になります]

【形状・構造及び原理等】

本品の材質は、ステンレス鋼である。

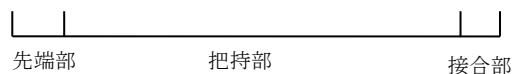

〈原理等〉

本品は 2 つの先細のパネ性先端部をもつ。この先端部を近接させて(閉じて)、対象物の保持・輸送を行う。

【使用目的又は効果】

口腔内に適用する創傷被覆・保護材を把持する。

【使用方法等】

〈使用方法〉

- (1) 創傷被覆・保護材を把持し、口腔内に適用する。
- (2) その他歯科用材料の保持・輸送に用いる。

【使用上の注意】

- (1) 器具の正しい使用のため、添付文書の注意・指示事項に従うこと。
- (2) 使用前に必ず洗浄・滅菌（保守・点検に係る事項参照）をすること。
- (3) 使用目的以外の目的で使用しないこと。また、折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力（応力）を加えないこと。
- (4) 使用後は、器具に付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないうちに、直ちに拭き取り錆防洗浄液等に浸漬すること。
- (5) 本品は歯科用材料保持・補助器具のため直接火炎にさらさないこと。また、歯科有資格者以外は使用しないこと。
- (6) 塩素系及びヨウ素系の消毒液は、腐食の原因となるので使用を避けること。使用中に付着したときは直ちに洗い流すこと。
- (7) 腐食(錆)の原因となるので、次亜鉛素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン、超酸性水、家庭用洗剤等は使用しないこと。
- (8) 腐食(錆)の原因となるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウール・金ブラシ、ヤスリ等の鋼製工具を使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

- (1) 貯蔵・保管にあたっては、洗浄をした後、変色・腐食を防ぐために保管期間の長短にかかわらず必ず乾燥をすること。
- (2) 「もらい錆」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。また、化学薬品と一緒に収納・保管しないこと。
- (3) 水分及び薬品等が付着したまま保管しないこと。
- (4) 滅菌済みのものを貯蔵・保管するにあたっては、再汚染を防ぐため清潔な場所に保管すること。
- (5) 本品は、長期間の使用により、鋼材の疲労・摩耗で耐久性の低下が生じるため適時交換すること。
- (6) 本品は、歯科従事者以外は触れないように適切な保管・管理をすること。

〈耐用期間〉

製造出荷後、正規の保守点検を行った場合に限り、1 年とする。

【保守・点検に係る事項】

- (1) 使用（滅菌）前に、汚れ、傷、曲がり、錆び、変色、及び先端の損傷等に異常がないか点検すること。
- (2) 精製水以外での洗浄は、器具を腐食させるおそれがあるため、使用を避けること。
- (3) 通法に従い、必ず滅菌を行うこと（オートクレーブ可）。オートクレーブの際は、精製水を使用すること。
- (4) 金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は、器具の表面が損傷するので汚物除去及び洗浄時に使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者

株式会社デンテック

〒174-0053 東京都板橋区清水町 5 3-5

TEL：03-3964-2011

FAX：03-3962-5624

2. 外国製造業者

AKMO Instruments（アクモ インストルメンツ）

パキスタン・イスラム共和国