


一般医療機器

機械器具 (50) 開創又は開孔用器具
歯科用開口器 JMDN コード：70949000

リップエキスパンダー

【形状・構造及び原理等】

材質は、ポリプロピレンである

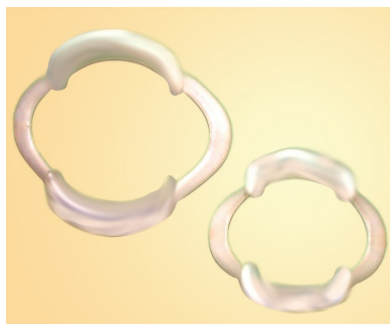

品名

- リップエキスパンダー 大
- リップエキスパンダー 小
- リップエキスパンダー アソート (大小各 5 個入)
- **○リップエキスパンダー アソート (大小各 2 個入)

サイズ	大
	小

〈原理〉

口唇の開口状態が保持される。

【使用目的又は効果】

歯科治療、口腔内写真撮影および口腔衛生指導等に使用する。口唇に引っ掛けて牽引し、開口状態を保持する器具である。
なお、本品は再使用可能である。

*【使用方法等】

本品を手指にて、リトラクター部を口唇に引っ掛け装着する。

*【使用上の注意】

- (1) 折損、曲がり等の原因になり得るので、使用時に必要以上の応力を加えないこと。
- (2) 購入時は未滅菌のため、使用前に必ず洗浄・滅菌を行うこと。
(保守・点検に係る事項参照) また、次回使用時にも同様に行うこと。(滅菌法：オートクレーブ滅菌、滅菌条件：121℃ 20 分間、ただし、乾燥工程は避けること)
- (3) 滅菌回数を考慮した推奨使用限度は 3 回である。ただし、本品を使用中に操作性が低下した場合には、すぐに使用を中止し、新しいものと交換すること。
- (4) 口の大きさによっては本品が装着できない場合もあるので、無理に使用しないこと。

*【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

- (1) 水分・汚れ・薬液等が付着したまま保管しないこと。
- (2) 常温・常湿で直射日光を避け、清潔な場所で保管すること。

*【保守・点検に係る事項】

- (1) 使用後は、付着している血液・体液・組織及び薬品等が乾燥しないうちに、直ちに洗浄もしくは滅菌を行うこと。
- (2) 長時間の薬液への浸漬は行わないこと。
- (3) 本品の消毒用薬液は次のものを推奨する。その際、使用方法は各薬液の指示に従うこと。
 - ・ グルタルアル製剤 (例：デントハイド)
 - ・ グルコン酸クロルヘキシジン (例：ヒビテン)
 - ・ 塩化ベンゼトニウム液 (例：ラスノンメディカル)
 - ・ 塩素系消毒液 (例：インプロステリン)

(4) 消毒・滅菌を行う際は、次のものを使用しないこと。

- ・ EOG 滅菌、乾熱滅菌、ケミクレープ
- ・ シンナー、消毒用エタノール系液等
- ・ 殺菌灯
- ・ 強アルカリ、強酸性洗剤、消毒剤
- ・ 金属タワシ、クレンザー (磨き粉等)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社デンテック

〒174-0053 東京都板橋区清水町 5 3 - 5

TEL：03-3964-2011

FAX：03-3962-5624