

スプーンエキスカ スーパーエッジ

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

- (1) 本品は、大変鋭利な刃物です。取り扱いには充分注意の上、漏随等にも配慮すること。
- (2) 電気メスを用いた接触凝固は、術者が感電、火傷をする危険性があり、又、器械の表面を損傷するので併用しないこと。

【形状・構造等】

No.3 (R015)

No.4 (R020)

ENDO R015

ENDO R020



【使用目的又は効果】

「使用目的」

○軟化象牙質除去用インスツルメント

「効果」

○窩洞形成時の軟化象牙質の切削及び除去器具。

【使用方法等】

「使用方法」

通法にもとづき口腔内検診を行い、形成する窩洞に最適なサイズのエキスカを選択し軟化象牙質の除去を行い、窩洞形成を行います。その際必要に応じて麻酔を行います。

【使用上の注意】

1) 使用注意

- ① 器具の正しい使用のため、添付文書の注意・指示事項に従うこと。
- ② 器具の形態変更や改造等はしないこと。
- ③ 製品の仕様は改良のため、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
- ④ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ⑤ 電気メスを用いた接触凝固は、術者が感電、火傷をする危険性があり、又、器械の表面を損傷するので併用しないこと。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- ① 本品は必ず使用前に傷・バリ・ガタつき・緩み等がないことを確認する事。使用に適さない場合には新しい物と交換すること。
- ② 使用前に必ず洗浄・滅菌（保守・点検に係る事項参照）を行うこと。（オートクレーブ可）
- ③ 使用目的（手術・処置等の医療行為）以外の目的で使用しないこと。
- ④ 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力（応力）を加えないこと。
- ⑤ 使用後は、付着している血液・体液・組織及び薬品等が乾燥する前に洗浄し、その後、必ず歯科小器具専用の防錆剤入り器具洗浄剤を使用する事。なお、洗浄剤使用法はメーカー説明書に従ってください。
- ⑥ 刃先の状況は絶えず確認すること、切れ味の低下した物や使用に適さない物は新しい物と交換する。
- ⑦ 本品は刃物ですので口腔内外での取扱いに十分注意すること。

- ⑧ 器具の脱落は誤飲等の重大事故につながる危険性が高いので十分に確認作業を行い注意をして取扱う。
- ⑨ 刃先が鋭利なため健全歯質に引っかけた状態で大きな力を加えると折れる危険性があるため十分に注意すること。
- ⑩ 本品は軟化象牙質除去用のエキスカです。火炎にさらしたり、他の目的に使用しないで下さい。

【保管方法及び有効期間等】

1) 保管方法

- ① 錆びる恐れがあるため水分が付着したまま保管しないこと。
- ② 湿度の高い場所に長時間放置しますと錆びて器具が故障してしまう恐れがありますので、湿度が低く、清潔な場所に保管して下さい。
- ③ 消毒方法によっては本体変色してしまったり、錆びてしまう可能性があります。
- ④ 金属たわし、クレンザー（磨き粉）などは、器具の表面が損傷するので汚物除去及び洗浄時に使用しないこと。
- ⑤ 滅菌済みのものを保管するにあたっては、再汚染を防ぐため清潔な場所に保管するとともに、有効期間の管理をすること。
- ⑥ 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

- ① 使用（滅菌）前に、汚れ、傷、曲がり、歯の損傷等に異常がないか点検すること。
- ② 強アルカリ／強酸性洗剤・消毒剤は、器具を腐食させるおそれがあるので、使用を避けること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売元

株式会社デンテック
〒174-0053 東京都板橋区清水町 53 番 5 号
TEL : 03-3964-2011
FAX : 03-3962-5624

2. 販売元

株式会社日本歯科工業社
〒110-8530 東京都台東区上野 5-12-8
TEL : 03-3836-2191
FAX : 03-3836-2199