

一般医療機器

機械器具(25) 医療用鏡
歯鏡 JMDNコード：31776000

HRフロントミラー

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

- (1) 本品は、必ず使用前に傷・バリ・破損等がないことを確認し、異常が見られる場合は使用しないこと〔口腔内を傷つける又は破片を誤飲するため〕。

【形状・構造及び原理等】

本品の材質は、ガラスおよびステンレス鋼である。

サイズ0



サイズ4



＜原理等＞

本品を口腔内に挿入することにより、口腔内の状態を本品に映すことが可能である。

【使用目的又は効果】

口腔内診査又は圧排のために用いるミラーヘッドからなる歯科用器具。

【使用方法等】

本品をハンドル等に取り付け、口腔内に挿入し診査部位を鏡面に映す。又は頬舌を圧排する。

【使用上の注意】

＜使用注意＞

- (1) 本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- (2) 購入時は未滅菌のため、使用前に必ず洗浄・滅菌を行ない、次回からの使用時にも同様に行なうこと。
- (3) 通法に従い、使用前・使用後に必ず洗浄・滅菌（保守・点検に係る事項参照）をすること。（オートクレーブ可）
- (4) 折損・曲がり等の原因になり得るので、使用時に必要以上の力（応力）を加えないこと。
- (5) 破損や事故等の原因となるので、器具の形態変更や改造・分解等は絶対に行わないこと。
- (6) いこと。
- (7) 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないように、直ちに防錆洗浄液や精製水等に没漬すること。
- (8) 使用前にハンドル等のネジ部にゆるみがないか確認し、ゆるんでいた場合は確実に締めること。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- (1) 本品は、湿度の高い場所に長時間放置した場合、錆びて使用出来なくなる恐れがあるため、湿度が低く、清潔な場所に保管すること。（防錆潤滑油の塗布を推奨する）
- (2) 「もらい錆」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。また、化学薬品と一緒に収納・保管しないこと。
- (3) 錆びる恐れがあるため、水分が付着したまま保管しないこと。

- (4) 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- (5) 塩素系消毒剤などアルカリ性の消毒剤あるいは強い酸化作用のある消毒剤の使用は避けること。
- (6) 薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守ること。薬剤によっては、本品の素材に影響を及ぼすことがある。
- (7) 本品を消毒・滅菌又は保管する際は、他の器具と接触しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

- (1) 洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
- (2) 超音波洗浄不可。〔ロジウムコーティングの剥離の恐れ〕
- (3) 洗浄・消毒用の薬液については、以下の検証済み薬液以外は、腐食の原因となる可能性があるため使用しないこと。使用中に付着した場合は、直ちに洗い流すこと。（あくまで自社基準による検証のため、以下の各薬液を含有する薬品を使用する場合は、その取扱説明書等の指示に従うこと）
＜検証済み薬液＞
塩化ベンゼトニウム、グルタルアルデヒド、塩素系消毒液、グルコン酸クロロヘキシジン、強酸性水
- (4) 腐食等の原因となるため、洗浄の際、磨き粉や鋼製工具（ワイヤーブラシ・ヤスリ等）を使用しないこと。拭く場合は、マイクロファイバーのような柔らかい布を用いること。
- (5) 洗浄の際は必ず精製水を使用し、洗剤等の残留がないよう十分にすすぎ、水分を除去・乾燥させること。〔洗浄成分が高温で焼き付き、くもりの原因となるため、洗剤が表面の傷等に残ったままオートクレーブを行わないこと。〕
- (6) 本品は必ず使用前に傷・バリ等がないことを確認すること。口腔内を傷つける可能性がある場合には新しい物と交換すること。
- (7) 洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者

株式会社デンテック

〒174-0053 東京都板橋区清水町 53-5

TEL：03-3964-2011

FAX：03-3962-5624

2. 製造業者

ローダー デンタルインスツルメント社（ドイツ）

*Roeder Dentalinstrumente GmbH & Co. KG