

一般医療機器

歯科材料（09）歯科用研削材料
歯科技工用 スチール切削器具 JMDN コード：70743000

技工用ドリル

【形状・構造及び原理等】

- (1) 材質：ステンレス鋼
- (2) 形状、構造



サイズ
φ2.3

- (3) 原理等
歯科技工用ハンドピースに装着し、回転させて使用する。

【使用目的又は効果】

歯科技工用として、レジンを研削するために使用する。

【使用方法等】

〔使用方法〕

歯科技工用ハンドピースに装着し使用する。
(推奨回転数：800rpm 以下)

【使用上の注意】

- (1) 推奨回転数を超えて使用しないこと。
- (2) 本品は技工用の器具であるため、口腔内では使用しないこと。
- (3) 滅菌は不可のこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- (1) 常温・常湿で直射日光を避け、清潔な場所で保管すること。
- (2) 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売元
株式会社デンテック
〒174-0053 東京都板橋区清水町 53-5
TEL：03-3964-2011
FAX：03-3962-5624
2. 発売元
株式会社インプラントデント
〒125-0061 東京都葛飾区亀有 5-40-2 石井ビル 1 F