

器 25 医療用鏡
一般医療機器 歯鏡 (31776000)

トールス ミラー タフ

【警告】



1. 日常の手入れと点検は必ず実施し、異常がある場合は直ちに使用を中止すること。
2. 使用前・使用後は、患者ごとに必ず洗浄・滅菌を行うこと。(感染防止)

【禁忌・禁止】

1. 口腔内写真撮影・確認以外で使用しないこと。
2. 改造しないこと。
3. 不具合状態で使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

本品は、ステンレス板の表面に炭素固溶拡散処理し、歯鏡としている。

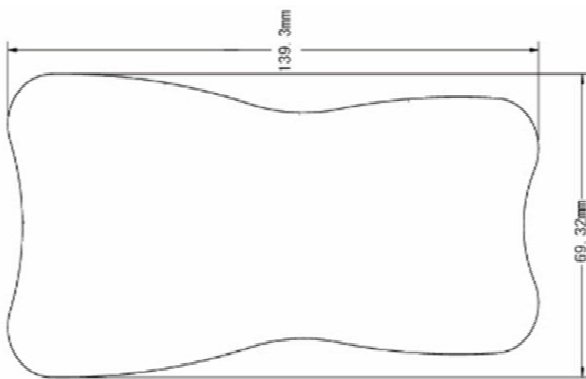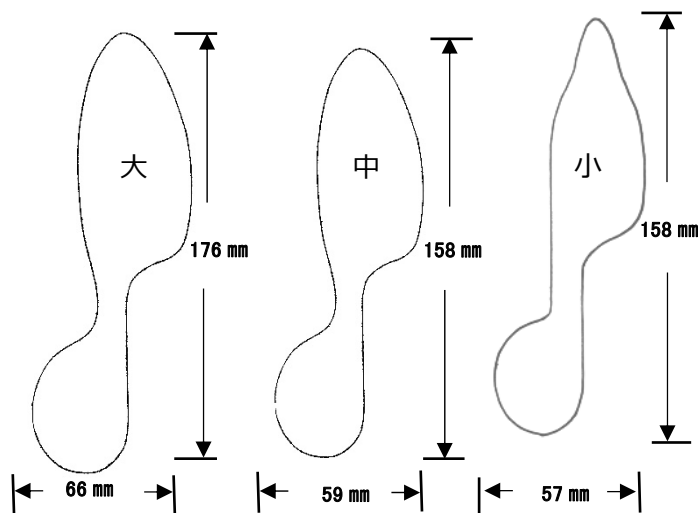

厚さは全て 1.5mmである

【使用目的、効能又は効果】

本品は口腔内診査、撮影補助に用いる歯科用器具である。

【操作方法又は使用方法】

本品を口腔内に挿入し、撮影部位が映る位置にあわせ、診察や映った画像を確認し、撮影する。

【使用上の注意】

1. 未滅菌ですので、洗浄・滅菌処理をしてご使用してください。
次の方法での滅菌が可能です。
・オートクレーブ 132°C/10 分以上
・プラズマ滅菌
・ガス滅菌
2. 滅菌の前に、十分な洗浄を行って下さい。洗浄が不十分な場合、オートクレーブの乾燥工程で汚れが焼きつき、表面にシミが残る場合がございますのでご注意ください。
3. 超音波洗浄器使用の際は、他のものと接触させない様にしてください。
4. 探針・ピンセット等の鋭利なものと接触させないで下さい。
5. ミラーの曇り対策として、パーナーのご使用は避けて下さい。

【貯蔵・保管及び使用期限等】

1. 貯蔵・保管方法
付属の保管用袋か、市販の滅菌パックに入れて保管して下さい。
2. 使用期限
特になし。

【廃棄】

1. 廃棄の際は、各自治体の指示に従って処分して下さい。

【包装】

咬合面用 S.M.L サイズ各 1 枚入りで販売

【製造販売業者及び製造者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元

株式会社デントロケミカル

住所 〒198-0023 東京都青梅市今井 3-2-12

TEL 0428-30-7450 FAX 0428-30-7460

販売元

株式会社デントロニクス

住所 〒169-0042 東京都新宿区早稲田町 68

TEL 03-3209-7121 FAX 03-3232-6764