

【一般医療器】 類別：医 04

類別名称：整形用品

JMDN コード：34864000

一般的名称：救急絆創膏

クラス分類：I

特定保守：非該当

販売名：絆創膏

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、アクリル系粘着剤を塗布した塩化ビニル粘着テープとポリエステル、ビスコース、PEフィルムのパッドからなる救急絆創膏です。

エチレンオキサイドガスで滅菌している。

	全体サイズ (パッドサイズ)
長方形	19mm×72 mm (19mm×23 mm)
角型	38mm×38 mm (20mm×20 mm)
ハート型	32mm×38 mm (13mm×15 mm)

【使用目的又は効果】

創傷面の保護

【使用方法等】

創傷面を清潔にし、パッドが創傷面にあたるように貼ってください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

本品の使用により発疹・発赤、かゆみ等が生じた場合は、使用を中止し、医師、薬剤師又にご相談ください。

2. その他の注意

- 1)パッド部分が濡れ、又は汚れたまま放置すると傷の治りが悪くなりますので、貼り替えてください。
- 2) 創傷面を清潔にし、パッド部分を汚さないよう注意して使用してください。
- 3)粘着面を創傷面に貼らないでください。
- 4)お子様が使用する場合は、保護者の指導のもとにご使用下さい。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 1)直射日光をさけ、涼しい所に保管してください。
- 2)小児の手の届かない所に保管してください。

2. 有効期間

3 年(自己認証による)/有効期限は外箱に記載

【製造元】

RFX+CARE Manufacturing Co.,Ltd .

(アールエフエックスケア マニファクチャリング)

【輸入先国】中華人民共和国

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

株式会社 テイエムアイ

〒352-0006 埼玉県新座市新座 1-2-10

Tel:048-481-2501 Fax:048-481-9913

医療機器製造販売業許可番号：11B2X00040

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。また、必要に応じて読めるように大切に保管してください。