

作成年月日：2023 年 3 月 20 日作成（新様式第 1 版）  
改定年月日：

医療機器製造販売業許可番号：11B2X00040  
※製造販売届出番号：11B2X00040000680

【一般医療器】 類別：医 04 類別名称：整形用品 JMDN コード：34864000  
一般的名称：救急絆創膏 クラス分類：Ⅰ 特定保守：非該当  
販売名：絆創膏

【禁忌・禁止】  
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】  
本品は、アクリル系粘着剤を塗布した塩化ビニル粘着テープとポリエステル、ビスコース、PEフィルムのパッドからなる救急絆創膏です。  
エチレンオキシドガスで滅菌している。

|      |                            |
|------|----------------------------|
|      | 全体サイズ<br>(パッドサイズ)          |
| 長方形  | 19mm×72 mm<br>(19mm×23 mm) |
| 角型   | 38mm×38 mm<br>(20mm×20 mm) |
| ハート型 | 32mm×38 mm<br>(13mm×15 mm) |

【使用目的又は効果】  
創傷面の保護

【使用方法等】  
創傷面を清潔にし、パッドが創傷面にあたるように貼ってください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意  
本品の使用により発疹・発赤、かゆみ等が生じた場合は、使用を中止し、医師、薬剤師又にご相談ください。

2. その他の注意  
1)パッド部分が濡れ、又は汚れたまま放置すると傷の治りが悪くなりますので、貼り替えてください。  
2) 創傷面を清潔にし、パッド部分を汚さないよう注意して使用してください。  
3)粘着面を創傷面に貼らないでください。  
4)お子様が使用する場合は、保護者の指導のもとにご使用下さい。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法  
1)直射日光をさけ、涼しい所に保管してください。  
2)小児の手の届かない所に保管してください。

2. 有効期間  
3 年(自己認証による)/有効期限は外箱に記載

【製造元】  
RFX+CARE Manufacturing Co.,Ltd .  
(アールエフエックスケア マニュファクチャリング)

【輸入先国】中華人民共和国

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】  
株式会社 テイエムアイ  
〒352-0006 埼玉県新座市新座 1-2-10  
Tel:048-481-2501 Fax:048-481-9913  
医療機器製造販売業許可番号：11B2X00040