

器 69 歯科用蒸和器及び重合器
一般医療機器 歯科技工用成型器 JMDN 70750010


シングルジェット

【警告】

高温の処理物等を扱うため、処理物の扱いは断熱手袋や専用の工具等を装備して、やけどをしないように注意すること。

【形状・構造及び原理等】

装置外観図

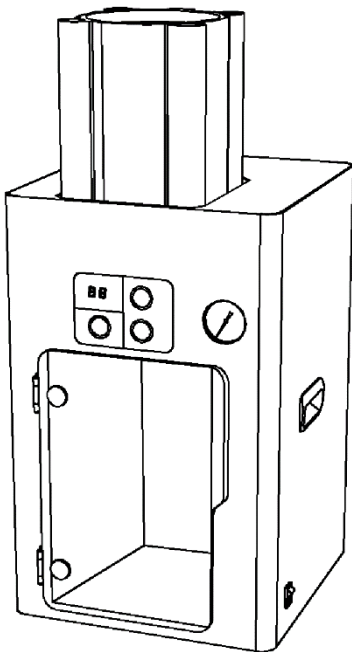

【使用目的又は効果】

本器は熱可塑性材料や熱硬化樹脂を射出/成形し、義歯床または補鉄物を作成する装置である。

【使用方法等】

1) 取り付け、設置

付属の取扱説明書を参照して機器の取り付け、設置を行うこと。

2) 操作方法または、使用方法

機器の詳細な操作方法および、使用方法是付属の取扱説明書を必ずお読みください。

【使用上の注意】

詳細については取扱説明書を使用前に必ずお読みください。

1) 熟練したもの以外は機器を使用しないこと。

2) 機器を使用する前には次の事項に注意すること。

①アースが完全に接続されていることを確認すること。

②周囲に燃えやすい物が無いこと。

3) 機器の使用中は次の事項に注意すること。

①機器から異臭、異音が出るときは速やかに機器の電源を切り、弊社にご連絡ください。

②機器全般に異常が起きないか絶えず監視すること。

4) 機器の使用後は次の事項に注意すること。

①次回からの使用に支障のないように清拭すること。

**【保管方法及び有効期間等】

〔耐用期間〕

製造日から、正規の保守点検を行った場合に限り 10 年間とする。

記載の耐用期間は自己認証（当社データ）による。

【保守・点検に係る事項】

1) 機器及び部品は必ず定期点検を行うこと。

2) 長い間使用しなかった機器を再使用するときには、使用前に必ず装置が正常、かつ安全に作動することを確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1) 製造販売業者

デンケン・ハイデンタル株式会社

* TEL. 075-672-2118

2) 製造業者

デンケン・ハイデンタル株式会社