


歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN 70907000

ハイバレルミニ

【形状・構造及び原理等】

装置外観図

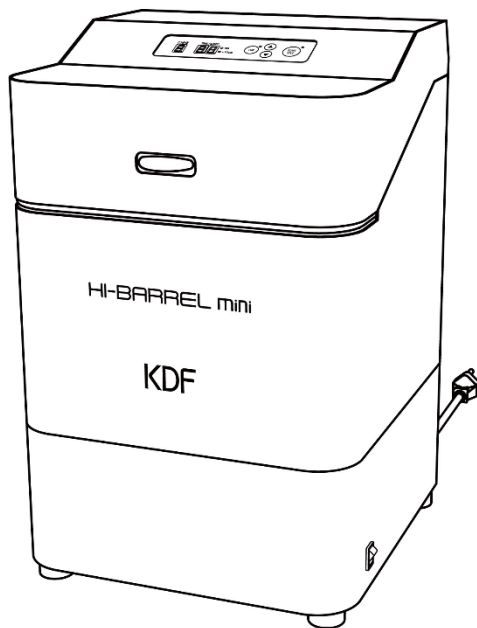

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる器材をいう。別に名称を定めるものを除く。

【使用方法等】

1) 取り付け、設置

付属の取扱説明書を参照して、水平でしっかりした机又は床に設置すること。

2) 操作方法または、使用方法

機器の詳細な操作方法および、使用方法は付属の取扱説明書を必ずお読みください。

【使用上の注意】

詳細については取扱説明書を使用前に必ずお読みください。

1) 機器を使用する前には次の事項に注意すること。

- ①アースが完全に接続されていることを確認すること。
- ②装置内の回転機構部に巻き込むような物がないこと。

2) 機器の使用中は次の事項に注意すること。

- ①機器から異臭、異音が出るときは速やかに機器の電源を切り、弊社にご連絡ください。
- ②機器全般に異常が起きないか絶えず監視すること。
- ③運転中は装置内の回転機構部が回転している為、フタを開けないこと。

3) 機器の使用後は次の事項に注意すること。

- ①機器の電源を切って、次回からの使用に支障のないように清拭すること。

** 【保管方法及び有効期間等】

〔耐用期間〕

製造日から、正規の保守点検を行った場合に限り 7 年間とする。

記載の耐用期間は自己認証（当社データ）による

【保守・点検に係る事項】

- 1) 機器及び部品は必ず定期点検を行うこと。
- 2) 長い間使用しなかった機器を再使用するときには、使用前に必ず装置が正常、かつ安全に作動することを確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1) 製造販売業者

デンケン・ハイデンタル株式会社

* TEL. 075-672-2118

2) 製造業者

デンケン・ハイデンタル株式会社