

機械器具 (60) 歯科用エンジン
一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット JMDN34713000

3DプリンターNextDent5100

【禁忌・禁止】

本品を歯科修復物の設計以外の目的で使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

(1) 形状

下記外観写真のとおり



(2) 構造

外形寸法	426 (W) × 489 (D) × 971 (H) mm 681 (W) × 704 (D) × 1356 (H) mm (台座付き)
質量	34.5 kg 54.5 kg (台座付き)
ネットビルドボリューム	124 (X) × 70 (Y) × 196 (Z) mm
波長	405 nm
ネイティブ解像度	65 µm
電源規格	100-240VAC、50-60Hz、4.0A

(3) 原理

ソフトウェアを用いて作成した設計データを本製品にインプットし、QR コードスキャナーで材料ボットの QR コードを読み取ることで造形を開始する。液体状の光硬化性樹脂に本体内部の光源体から特定波長の光を照射することにより硬化させて造形する。

【使用目的又は効果】

本品は、複合ソフトウェアを使用した装置で、技工所または技工室内に設置して歯科修復物のコンピュータ支援設計 (CAD) またはコンピュータ支援製造 (CAM) に用いる機器である。

【使用方法等】

- 3DSprint でビルドファイルを準備し、本製品の本体へ該当データをインプットする。
- タッチスクリーン下の QR コードスキャナーで材料ボットの QR コードを読み取る。
- タッチスクリーンのジョブ開始ボタンをタップする。

- 画面に印刷ジョブの進行状況及び印刷プレビューも表示されます。
- ジョブが完了すると画面に COMPLETED が表示されます。
- 使用後の処置、ソフトウェアを終了し、スキャナーの電源を切る。
- 取扱説明書を参照し、後処理を行う。

※取扱説明書は下記 URL をご参照ください。

https://support.3dsystems.com/s/article/nextdent-5100-guide-translations?language=en_US

**【使用上の注意】

- 精密機械のため、取扱には十分注意すること。
- 機器を修理、改造しないこと。
- 使用前に取扱説明書を確認し、本品の操作に精通した者が使用すること。
- 本品を使用目的に記載された事項以外には使用しないこと。
- 本品を歯科医療従事者以外が使用しないこと。
- 造形中の照射光を直視しないこと
- 本品は、換気が可能であり水平かつ強い振動や衝撃の加わらない安定な場所で使用すること。
- 使用後のパーツは、取扱説明書に従って洗浄し、異なる樹脂が混ざらないようにすること。
- 残留した材料は、各製造業者の提供する取扱説明書及び法令に従って廃棄すること。

**【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 直射日光を避け、水のかからない室内環境下に保管すること。
- 傾斜、振動、衝撃のない安定した環境で保管すること。

〔耐用期間〕

製造日から、正規の保守点検を行った場合に限り 5 年間とする。
記載の耐用期間は自己認証による。

**【保守・点検に係る事項】

- 機器及び部品は、トレーニングを受けた者が、取扱説明書に従って必ず定期的な保守点検を行うこと。
- 本品を清掃する場合は、取扱説明書に従って実施すること。
- しばらく使用しなかった機器を再使用する時には、使用前に必ず機器が正常かつ安全に動作することを確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：デンケン・ハイデンタル株式会社

* TEL. 075-672-2118

外国製造業者：3D Systems Corporation

製造国：アメリカ合衆国

取扱説明書を必ずご参照ください