

一般医療機器 器 70 歯科技工用ポーセレン焼成炉 JMDN 35762000

ジルコムスピード

【警告】

- ①本製品は歯科技工用のポーセレン焼成炉です。他の用途には使用しないこと。
- ②機器の操作は習熟したもの以外は使用しないこと。
- ③使用者の安全を守り、機器を正しく使用するために注意事項を必ず守ること。
- ④故障したときは、適切な指示を行い、修理は専門家に任せること。
- ⑤高温の焼成物等を扱うため、焼成物の扱いは断熱手袋や専用のピンセット等を装備して、やけどをしないように注意すること。また、保護メガネを着用すること。


【禁忌・禁止】

次の行為は危険ですのでやめてください

- ①機器の改造
- ②不具合、故障状態での使用
- ③未整備状態での使用（未整備状態とは、定期点検や日常の点検をしていない状態をいう）

【形状・構造及び原理等】

装置外観図

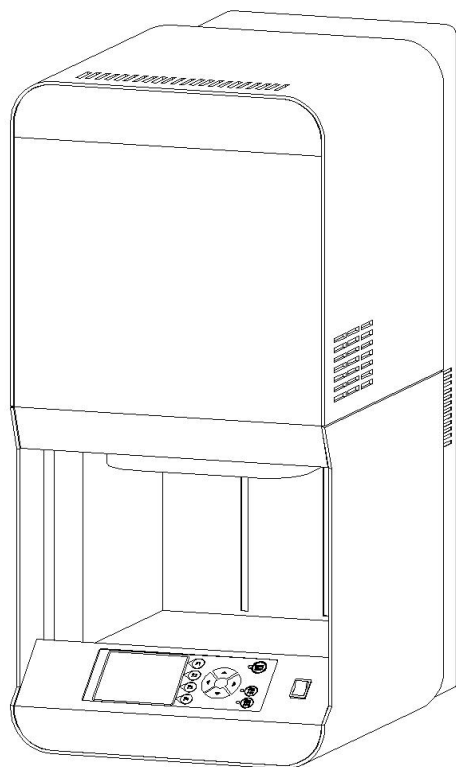

【使用目的、効能又は効果】

本器はポーセレンを焼成するために用いられる歯科技工用の焼成炉である。

【品目仕様等】

電源電圧	AC200V ±10% 50/60Hz
消費電力	2.5kVA
有効加熱寸法	φ90 x 80 (H) mm
本体外形寸法	300 (W) x 640 (H) x 450 (D) mm
焼成台寸法	φ95 mm
最高使用温度	1600℃
質量	29kg
温度センサー	JIS R 熱電対
使用環境温度	10～40℃
使用環境湿度	30～90%RH（結露の無いこと）
プログラム容量	100 種類

【操作方法または、使用方法等】

- 1) 取り付け、設置
 - ① 機器の取り付け、設置は専門知識を持った担当者が行なうこと。
 - ② 機器の詳細な取り付け、設置は付属の取扱説明書を参照すること。
 - ③ 機器は安定した、しっかりした台の上に設置すること。

2) 操作方法または、使用方法

本機の詳細な操作方法および、使用方法は付属の取扱説明書を必ずお読みください。

【使用上の注意】

詳細については取扱説明書を使用前に必ずお読みください。

- 1) 熟練したもの以外は機器を使用しないこと。
- 2) 機器を使用する前には次の事項に注意すること。
 - ① アースが完全に接続されていることを確認すること。
 - ② 周囲に燃えやすい物が無いこと。
- 3) 機器の使用中は次の事項に注意すること。
 - ① 機器から異臭、異音が出るときは速やかに機器の電源を切り、弊社にご連絡ください。
 - ② 機器全般に異常が起きないか絶えず監視すること。
 - ③ 外装温度が上昇するため、体が機器に触れないようにすること。
- 4) 機器の使用後は次の事項に注意すること。
 - ① 機器の温度が下がってから、次回からの使用に支障のないように清拭すること。

【保守・点検に関わる事項】

- 1) 機器及び部品は必ず定期点検を行うこと。
- 2) 長い間使用しなかった機器を再使用するときには、使用前に必ず装置が正常、かつ安全に作動することを確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

- 1) 製造販売業者
デンケン・ハイデンタル株式会社
TEL：075-672-2118
- 2) 製造業者
デンケン・ハイデンタル株式会社