

機械器具(60) 歯科用エンジン
一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット JMDN34713000


DH ソニックマイティ 4K

【禁忌・禁止】

- ・本品を歯科修復物の設計以外の目的で使用しないこと。
- ・造形中は必ず遮光カバーを被せ、直接光源を見ないようにすること
- ・使用するプリント材料の安全情報を厳守すること

*【形状・構造及び原理等】

1) 形状: 下記外観写真の通り

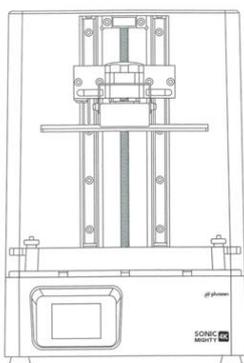

2) 構造・構成ユニット

本体外形寸法	280 (W) × 280 (D) × 440 (H) mm
質量	8kg
出力サイズ	200 (X) × 125 (Y) × 220 (Z) mm
光源波長	405nm
解像度	X-Y : 0.052mm Z : 0.01-0.3mm
電源	100-240VAC、50/60Hz
電力	70W

【使用目的又は効果】

本品は、複合ソフトウェアを使用した装置で、技工所または技工室内に設置して歯科修復物のコンピュータ支援設計(CAD)またはコンピュータ支援製造(CAM)に用いる機器である。

【使用方法等】

1) 操作方法

1. スライサーソフト ChiTuBox でビルドファイルを準備し、USBメモリーに保存し、本製品の本体のUSBスロットへ差し込みます。
2. プリント材料をレジンパットに注ぎます。
3. プラスチックケースを被せ、材料を遮光します。
4. タッチスクリーンの3D-PRINTボタンをタップし、表示されるリストからプリントするデータをタップします。
5. タッチスクリーンのGOボタンをタップすると造形が開始されます。
6. 造形中は画面に印刷ジョブの進行状況及び印刷プレビューも表示されます。

7. 造形が完了すると画面にConfirmが表示されます。
8. 付属の金属スクレーパーを使用して、プラットフォームから造形物を慎重に剥がします。
9. 取扱説明書を参照し、後処理を行ってください。

【使用上の注意】

- ・精密機械のため、取扱には十分注意すること。
- ・機器を修理、改造しないこと。
- ・本品の操作に精通していること。
- ・プリント材料が付着した場合は速やかに拭き取ること。
- ・本品は、使用目的に記載された事項以外には使用しないこと。
- ・本品を歯科技工士資格者以外には使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

- ・本品の清掃は中性洗剤等を含ませた布またはティッシュで拭き取ってください。
- ・しばらく使用しなかった機器を再使用する時には、使用前に必ず機器が正常かつ安全に動作することを確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元: デンケン・ハイデンタル株式会社

TEL : 075-672-2118

Mail : support@denken-highdental.co.jp

外国製造業者: PHROZEN TECH CO., LTD.

製造国: 台湾

取扱説明書を必ずご参照ください