

歯科材料 09 歯科用研削体材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

チャモイスホイール

【形状・構造及び原理等】

形状: レーズ用 $\phi 65 \times 10 \text{ mm}$
ハンドピース用 $\phi 20 \times 5 \text{ mm}$

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元: デンケン・ハイデンタル株式会社

**住所: 〒601-8356

京都府京都市南区吉祥院石原京道町24番地3

**電話番号: 075-672-2118

【使用目的又は効果】

補綴物等の艶出し研磨に用いる。
歯科用金属、義歯床及び硬質レジン等の艶出し研磨用。

製造元: デンケン・ハイデンタル株式会社

【使用方法等】

- ・レーズ用: 本品を歯科技工用電気レーズのチャック部に取り付け回転させて使用します。
- ・ハンドピース用: 本品を歯科技工用ハンドピースに取り付け回転させて使用します。

【使用上の注意】

1) 使用注意

- ①レーズ用: 3,400 rpm、
ハンドピース用: 10,000 rpm
の回転数を超えて使用しないこと。
- ②損傷、変形等のあるものは、使用しないこと。
- ③目の損傷を防ぐために、保護メガネなどを使用すること。
- ④本材は、【使用目的又は効果】の項及び説明書に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑤本材は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

(保管方法)

- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

レーズ用: 1個/袋
ハンドピース用: 12本/函