

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

ポーセレンルーージュ-D

【形状・構造及び原理等】

成分：ダイヤモンド粉、その他
形状：ペースト状

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：デンケン・ハイデンタル株式会社
** 住所：〒601-8356
京都府京都市南区吉祥院石原京道町24番地3
** 電話番号：075-672-2118

【使用目的又は効果】

補綴物等の艶出し研磨に用いる。
ポーセレン、硬質レジン及び歯科用金属等の艶出し研磨用。

* 製造元：デンケン・ハイデンタル株式会社

【使用方法等】

技工用ハンドピースにバフホイール等を装着し、回転させ、本品を塗布した補綴物の表面に軽く押しあて、艶出し研磨をする。

- より天然歯に近い形態を要求する時
ポーセレンファークネスで100%グレース完了すると隅角部や凸凹部が、たれ現象をおこし自然感が失われますが、ポーセレンファークネスでのグレースを約90%に止どめ本剤で艶出しすると素晴らしい自然感あふれるポーセレンが簡単に得られます。（「チャモイスホイール」及びロビンソンブラシで艶出し研磨して下さい。）
- グレース焼成後の艶不足時
ポーセレンに本剤を付け、「チャモイスホイール」、及びロビンソンブラシで研磨しますと簡単に艶が出ます。
- 切削調整後の艶出しに
サンドペーパー等で粗研磨後、本剤をポーセレンに付け艶出しして下さい。
- 光沢が出難い金属の艶出しに
ゴムホイール完了後メタルに本剤を付け「チャモイスホイール」又はロビンソンブラシで艶出し研磨して下さい。

【使用上の注意】

〔使用注意〕

- 本品を扱う際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- 本品は【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- 本品は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。

〔重要な基本的注意〕

- 本品が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、直ちに大量の流水で洗浄した後、眼科医の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

質量：5g/函