

歯科材料 06 歯科用印象材料  
一般医療機器 歯科複模型用ゴム質弾性印象材料 JMDN70891000

## ラボ・パテ

### 【形状・構造及び原理等】

構成品及び成分

構成名	性状	成分
主剤	白色 パテ状	ジヒドロキシポリジメチルシロキサン、 二酸化ケイ素、 流動パラフィン、その他
硬化剤	赤色 ペースト状	有機錫化合物、ケイ酸エステル、着色材、 その他

### 【使用目的又は効果】

技工用のコア用印象材に用いる。

### 【使用方法等】

練和時間：1分

操作時間：2分～3分（練和時間含む）

硬化時間：5分～7分

- ①主剤を付属の計量器ですり切り一杯（約21g）取ります。手のひら又は紙練板上に軽く押し広げ、計量器の縁を軽くあてて円の形をつけます。
- ②硬化剤をチューブの口径と同じ太さで約2.5cm出します。  
（この時チューブの先がベースに触れないように注意します）
- ③硬化剤を包み込むようにして、主剤の白色と硬化剤の赤色が均一に混ざるように30秒～60秒練和します。
- ④練和物を模型等の片面より気泡の入らないように注意深く圧接します。出来るだけ均一な厚みになるように目的の全面を覆います。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- ・硬化剤は、常に一定の太さに出すこと。
- ・硬化剤は空気に触れるとゲル化しやすいため、採取後はすみやかに密栓すること。
- ・硬化剤を長時間使用しない場合、ノズル部分で固くなることもあるので、取り除き、清掃してから使用すること。
- ・気温が高くなると、操作時間が短くなるので注意すること。
- ・気温が低いときは硬化が遅くなるので注意すること。
- ・皮膚の弱い方は、練和時にハンドクリームまたはポリ手袋を使用すること。

### 【使用上の注意】

【使用注意】

- ・他の製品と混用しないこと。
- ・本材は、技工用のコア印象材です。口腔内の印象用には使用しないこと。
- ・本材は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・本材は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。

【重要な基本的注意】

- ・本材の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状が現れた術者は、使用を中止し、医師の診察を受けること。
- ・本材または練和物は目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐ大量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。

### 【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・本材は、直射日光、火気を避け、常温の（15～25℃）で保管すること。
- ・開封後は、密閉して保管すること。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【包装】

【セット包装】

- ・主 剤：1.6kg
- ・硬化剤：35 mL x 1本
- ・付属品：計量器 1

【単品包装】

- ・硬化剤：35 mL x 1本

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及等】

製造販売元：デンケン・ハイデンタル株式会社

\*\* 住 所：〒601-8356

京都府京都市南区吉祥院石原道町24番地3

\*\* 電 話 番 号：075-672-2118

外国製造所：メガデンタル（megadental GmbH）

国 名：ドイツ