

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

スリムブラシ

【形状・構造及び原理等】

形 状：φ48 mm

構 造：樹脂の軸に羊毛を植立させ、特殊化学繊維を間に挿入させたブラシ

【使用目的又は効果】

ポリアミド製義歯のレーズ研磨用（歯頸部等の細部）

【使用方法等】

本品を歯科技工用電気レーズのチャック部に取り付け回転させて使用します。

【使用上の注意】

〔使用注意〕

- ①3,400 rpm の回転数を超えて使用しないこと。
- ②損傷、変形等のあるものは、使用しないこと。
- ③目の損傷を防ぐために、保護メガネなどを使用すること。
- ④本材は、【使用目的又は効果】の項に記載した用途以外には使用しないこと。
- ⑤本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

包装：1 ケ／函

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：デンケン・ハイデンタル株式会社

** 住 所：〒601-8356

京都府京都市南区吉祥院石原京道町 24 番地 3

** 電 話 番 号：075-672-2118

外国製造所：ケンダ（KENDAAG, Dental Manufacturing）

国 名：リヒテンシュタイン