


歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科技工用カーバイド切削器具 JMDN70744000

タングステンバー

【形状・構造及び原理等】

1)材質：タングステンカーバイド

2)構造

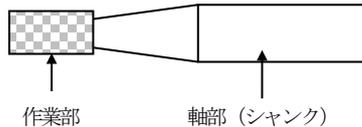

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：デンケン・ハイデンタル株式会社

** 住所：〒601-8356

京都府京都市南区吉祥院石原京道町24番地3

** 電話番号：075-672-2118

外国製造業者：ダイアスイス (DIASWISS SA)

国名：スイス

【使用目的又は効果】

金属、レジン、石こう等の研削用として用いる。

【使用方法等】

歯科技工用ハンドピースに装着し、回転させて被研削物に押し付けて研削します。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1)ハンドピース(タービン)メーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- 2)予め予備回転させて、振れがないことを確認すること。
- 3)頭部の細い、長い、大きい形状のものは、折れたり曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

【使用上の注意】

【使用注意】

- ①損傷、変形(表面キズ、曲がり)等のあるものは、使用しないこと。
- ②目の損傷を防ぐために、保護メガネなどを使用すること。
- ③本材は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ④本材は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

1本/函 6本/函