

機械器具 69 歯科用蒸和器及び重合器
一般医療機器 歯科技工用成型器 JMDN70750010

アンカージェット

【形状・構造及び原理等】

寸法：W275 mm×D295 mm×H610 mm

重量：32 kg

原理：本機に圧搾空気または窒素ガスを流入させ、圧力を利用して義歯床材料を射出成型することにより所定の形状に成型する。

【使用目的又は効果】

義歯床用材料を本機より射出成型し、義歯床又は補綴物を作製する装置である。

【使用方法等】

- ①通法のとおり脱ろうの完成した歯科用フラスコを本機のフラスコテーブルに設置する。
- ②義歯床用レジンを装填したシリンダーを歯科用フラスコに設置する。
- ③本機のエアースリンドラスイッチを操作し、歯科用フラスコに義歯床用レジン射出成型する。
- ④通法に従い義歯床を取り出し、研磨を完成する。

【使用上の注意】

- ・傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）などに対する安定状態に注意すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
- ・改造しないこと。
- ・本機は【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・本機は歯科医療有資格者以外が使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：デンケン・ハイデンタル株式会社

** 住 所：〒601-8356

京都府京都市南区吉祥院石原京道町24番地3

** 電話番号：075-672-2118

販売元：株式会社クエスト

住 所：〒475-0946

愛知県半田市横山町157-1

電話番号：0569(27)7071

FAX番号：0569(27)5998