


機械器具 66 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具 JMDN70682000

DHディスペンサー II

【形状・構造及び原理等】

形状:

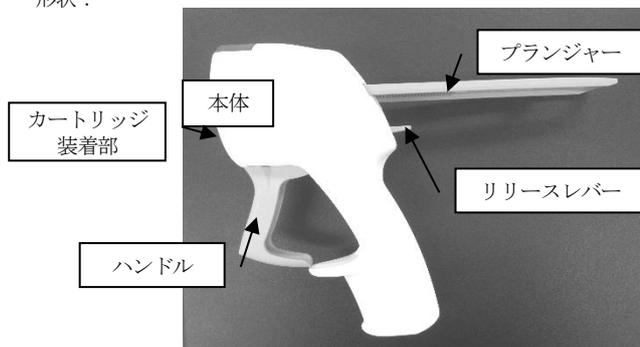


原理: ハンドルを握ることにより、ブランチャーが前進し、装着したカートリッジ内のペーストを押し出す。

【使用目的又は効果】


歯科材料を練和して押し出すための器具。

【使用方法等】

①リリースレバーを押し上げながら、ブランチャーを最後まで引き戻します。

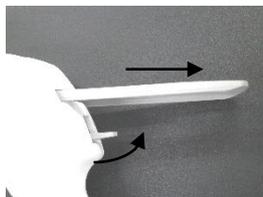


②ペーストの入ったカートリッジを上からスライドするようにはめ込み、左に90°回転させます。

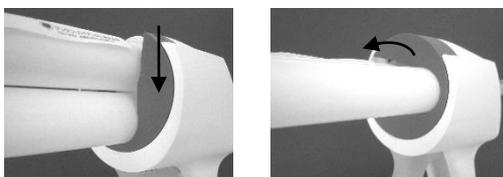

③カートリッジのキャップを取り外し、先端にDHミキシングチップ(別売り)を装着する。

(カートリッジの切り込み部分と、DHミキシングチップの出っ張り部分を合わせるように奥まで差込み、右に90°回転させ、しっかりと固定する。)

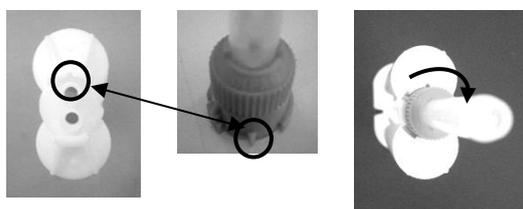

④ハンドルを握って、必要分を少しずつ押し出します。
⑤カートリッジを外すときは、リリースレバーを押し上げながら、ブランチャーを最後まで引き戻し、カートリッジホルダーを右に90°回転させてから上にあげ、カートリッジを取り外します。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- ・使用前に、カートリッジが本器に、又DHミキシングチップがカートリッジに確実に装着されていることを確認すること。
- ・ペーストを急激に押し出すと、ペーストの漏れ、カートリッジ及びDHミキシングチップの破損を引き起こす恐れがあります。押し出しは静かにすること。
- ・本器を使用する際は、使用する製品(カートリッジ)及びDHミキシングチップの添付文書の指示に従うこと。

【使用上の注意】

【使用注意】

- ・本器は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・本器が破損している場合は使用しないこと。
- ・本器は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・本器は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売元: デンケン・ハイデンタル株式会社

* 住所: 〒601-8356

京都府京都市南区吉祥院石原京道町24番地3

* 電話番号: 075-672-2118

製造元: Sulzer Mixpac AG (ズルツァー ミックスパック社)

国名: スイス