

機械器具 54 医療用捲綿子
一般医療機器 医科用捲綿子 10172000

Exスワブ001

(咽頭・角結膜用滅菌綿棒)



再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、プラスチック軸の先端部に細毛を配した綿棒です。

本品の各材質

綿球部分：ポリアミド(淡黄色)


軸部分：ナイロン(白色半透明)

本品の寸法

綿棒全長：151 mm

綿球

軸

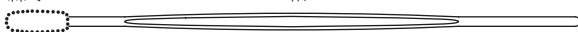

2. 包装

Exスワブ001 (咽頭・角結膜用滅菌綿棒) 50本入り(10本×5袋) 1箱
(商品番号：324009)

別売品

Exスワブ002 (鼻腔用滅菌綿棒) 50本入り(10本×5袋) 1箱
(商品番号：323996)

3. 滅菌・包装袋等

本品は滅菌済です。

【使用目的又は効果】

本品は、ウイルス検査や細菌検査の検体を採取するための綿棒(滅菌済)です。

【使用方法等】

- 1) 個包装袋の開封口よりフィルムをはがし、本品の軸部分をつまんで取り出します。
- 2) 検体採取は、採取部位や採取検体に応じた適正な方法及び操作で行ってください。
なお、角結膜からの検体採取時に出血や疼痛を伴う場合には適切な処置を行ってください。
- * 3) 本品は、咽頭又は角結膜等の比較的広い部位からの検体採取に適しています。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 1) 本品の使用は1回限りです。
- 2) 本品は滅菌済ですので、個包装袋に破れや汚染の疑いがある場合には使用しないでください。
- 3) 本品を冷蔵保存している場合、使用する場所で十分に放置し、15～30℃の温度となったことを確認してから開封し、速やかに検体採取に使用してください。
- 4) 本品に破損や折れ曲がり、または軸の一部が白く変化(白化)している場合、汚れなどがあった場合には使用しないでください。
- 5) 本品を使用するときは下記の点に留意し、軸を折らないように注意してください。
 - ・使用前に綿棒をしならせたり、変形させずご使用ください。
 - ・力を入れて押し込んだり、綿棒をねじったりしないでください。
 - ・抵抗や異常等を感じた際には、操作を中止してください。
 - ・使用時に曲がったり、軸が白化した場合は使用を中止してください。

- 6) 臨床検体の取り扱いの際には、感染の危険のあるものとして保護具(眼鏡、手袋、マスク等)を着用の上、充分注意をして操作してください。
- 7) 検体採取後の綿棒を輸送する際に、綿棒の包装袋は使用せず、適正な容器を使用し、二次感染に注意してください。
- 8) 本品を使用後は、滅菌処理してから廃棄してください。
廃棄する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法等の規定に従って処理してください。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：2～30℃に凍結を避けて保管してください。

水濡れに注意し、直射日光及び多湿を避けて清潔な場所に保管してください。

有効期間：使用期限は外箱及び個包装袋に記載してあります。
使用期限が切れたものは使用しないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造元 コパンイタリア エスピーエー
(外国製造業者) Copan Italia S.p.A. (イタリア)

製造販売元

デンカ株式会社
東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号

* 問い合わせ先

デンカ株式会社 試薬学術担当

〒103-8338 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号

フリーダイヤル 0120-206-072

受付時間 9:00～17:00 (土日祝日・弊社休業日を除く)