

2021 年 4 月改訂(新様式第 5 版)
2017 年 10 月改訂(新様式第 4 版)
2010 年 5 月改訂(第 3 版)


届出番号:28B3X00040000001

歯科材料09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科技工用アブレイブ研削器具 (JMDNコード:70901000)

モデルトリミングディスク

【形状・構造及び原理等】

- 1) 形状
円盤状

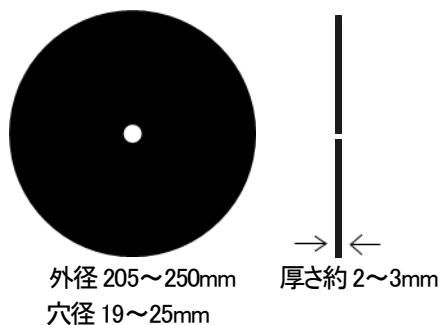

- ③ 各メーカー別に対応しておりますので、取り付け
付属品共必ず適応機種用を使用のこと。
④ 無理な角度、過度の加圧での使用はさけること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 デンタルエイド株式会社
ホームページ <http://www.dentalaid.co.jp>

2) 成分

ガラスクロス、シリコンカーバイド、
エポキシ樹脂系硬化剤、無機顔料

ディスクの規格

種 類	規 格
シロクス用	外径 230mm×穴径 22mm
モリタ用	外径 230mm×穴径 19mm
ヨシダ用	外径 230mm×穴径 19mm
旧モリタ・ヨシダ用	外径 250mm×穴径 19mm
レイフォスター用	外径 250mm×穴径 25mm
レイフォスターミニ用	外径 205mm×穴径 25mm
大栄用	外径 205mm×穴径 13mm

目の粗さ

種 類	カラー
標準目	黒色(側面イエロー)
荒目	黒色(側面ブルー)
極荒目	黒色

【使用目的又は効果】

歯科用石膏、埋没材の研削に用いる。

【使用方法等】

歯科技工用モデルトリマーに装着(専用補強板、専用ワッシャーを使用)し、回転させて、被研削物を押し付けて研削します。

【使用上の注意】

- ① モデルトリマーに確実に装着し、使用すること。
- ② 使用前に予備回転を行い、異常な振動やカバー等に接触のない事を確認すること。