


## ソフトポル

### 【形状・構造等】

円盤状

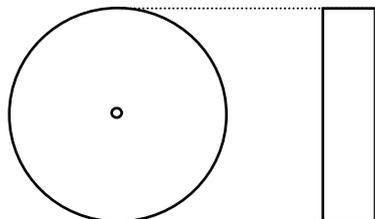

径25mm

厚 4~6mm

種類	色調	目の粗さ
ソフトポル・ハード	茶色	中目
ソフトポル・ソフト	紫色	細目

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 デンタルエイド株式会社

<http://www.dentalaid.co.jp>

### 成分

ナイロン不織布、酸化アルミナ、フェノール樹脂系及びシリコン系硬化剤

### 【使用目的または効果】

歯科技工用の研削材で、歯科補綴物等(金属、アクリックレジン、ポリカーボネート樹脂、硬質レジン、石膏等)の研削、研磨に用いる。

### 【使用方法等】

歯科技工用マンドレルに取り付け、歯科技工用回転機器に装着し、回転させて、ソフトタッチに被研削物に押し付けて、研削、研磨します。

### 【使用上の注意】

- ① 十分な強度のあるマンドレルに確実に装着し、中低速(最高使用回転数6,000rpm以下)で使用すること。最高使用回転数を超えた場合には、破折しけがをする恐れがあるので、使用回転数を厳守すること。
- ② 通常のマンドレルに装着する場合は、必ず添付のワッシャーを使用すること。
- ③ 使用前に予備回転を行い、振れがない事を確認すること。
- ④ 本材は頭部形状が大きく、折れ曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用はさけること。
- ⑤ 本材を使用する際には、目の損傷を防ぐために、保護眼鏡等を使用すること。