

歯科材料09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDNコード:70907000

カラーホイール


【形状・構造等】

1) 成分

不織布、酸化アルミニウム、顔料

2) 形状

円盤状(外径22mm×厚さ2~4mm)

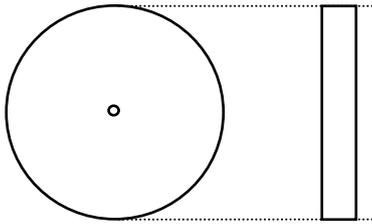

- ⑤ 本材は、歯科技工用の研磨材であるため、口腔内での使用は不可。
- ⑥ 滅菌については、オートクレーブ滅菌またはアルコール除菌が可能。滅菌後は、乾燥させてから、ご使用ください(カラカラに乾燥すると、研磨材が飛散して、研磨効果がなくなってしまうことがあります。ほんの少し湿気を残したほうが研磨効果があります。)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 デンタルエイド株式会社

<http://www.dentalaid.co.jp>

【使用目的又は効果】

歯科技工用の研削材で、歯科補綴物等の研削、研磨に用いる。

種類	色調	使用用途
カラーホイール・ブラウン	茶色	金属、レジンの傷取り
カラーホイール・ピンク	桃色	レジンのつや出し
カラーホイール・グリーン	緑色	金属のつや出し
カラーホイール・ホワイト	白色	一般的研磨

【使用方法等】

歯科技工用マンドレルに取り付け、歯科技工用回転機器に装着し、回転させて、ソフトタッチに被研削物に押し付けて、研削、研磨します。

ブラウン、ピンク、グリーンは、研磨材が含浸されているため、何もつけずに使用できる。

【使用上の注意】

1) 使用注意

- ① 十分な強度のあるマンドレルに確実に装着し、中低速(最高使用回転数6,000rpm以下)で使用すること。最高使用回転数を超えた場合には、破折してけがをする恐れがあるので、使用回転数を厳守すること。
- ② 使用前に予備回転を行い、振れがない事を確認すること。
- ③ 本材は頭部形状が大きく、折れ曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用はさけること。
- ④ 本材を使用する際には、目の損傷を防ぐために、保護眼鏡等を使用すること。