


フェルトホイール

【形状・構造等】

円盤状

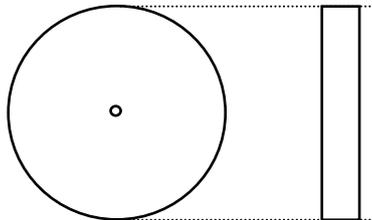

径22mm

厚約5mm

- ④ 本材を使用する際には、目の損傷を防ぐために、保護眼鏡等を使用すること。

【製造販売業者及び製造業の氏名又は名称等】

製造販売業者 デンタルエイド株式会社

ホームページ <http://www.dentalaid.co.jp>

種類	色調
フェルトホイール・イエロー	黄色
フェルトホイール・グリーン	緑色

成分

フェルト、酸化アルミナ、顔料

【使用目的または効果】

歯科技工用の研削材で、歯科補綴物等の研磨に用いる。

種類	使用用途
フェルトホイール・イエロー	レジン、硬質レジンのつや出し
フェルトホイール・グリーン	金属のつや出し

【使用方法等】

歯科技工用マンドレルに取り付け、歯科技工用回転機器に装着し、回転させて、ソフトタッチに被研削物に押し付けて、研磨します。

【使用上の注意】

1) 使用注意

- ① 十分な強度のあるマンドレルに確実に装着し、中低速(最高使用回転数6,000rpm以下)で使用する。最高使用回転数を超えた場合には、破折してけがをする恐れがあるので、使用回転数を厳守すること。
- ② 使用前に予備回転を行い、振れがない事を確認すること。
- ③ 本材は頭部形状が大きく、折れ曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用はさけること。