


歯科材料09 歯科用研削材料 一般医療機器
歯科技工用ダイヤモンド研削材 JMDNコード: 70902000


MTDダイヤ

【形状・構造等】

円盤状

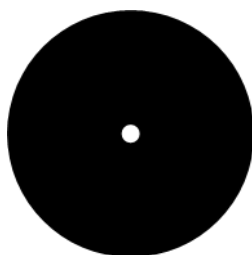

外径 230mm、250mm
穴径 19mm、22mm、25mm

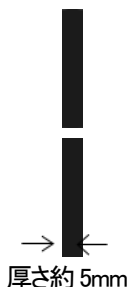

→ ←
厚さ約 5mm

- ③ 各メーカー別に対応しておりますので、必ず適応機種用を使用のこと。
- ④ 無理な角度、過度の加圧での使用はさけること。
- ⑤ ダイヤモンドは熱に弱いので、湿式で使用する
ことが望ましい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 デンタルエイド株式会社

ホームページ <http://www.dentalaid.co.jp>

ディスクの規格

種 類	規 格
シロクス用	外径 230mm × 穴径 22mm
モリタ&ヨシダ用	外径 230mm × 穴径 19mm
大径	外径 250mm × 穴径 25mm

目の粗さ

種 類	カラー
標準	黄色(大径はシルバー)
荒目	濃青色(大径はシルバー)

構造

円盤状ステンレス表面の水玉パターンにダイヤモンドを
熔着したもの を、塩ビ板に接着。真鍮ワッシャーを取り
つけたもの。

成分

ダイヤモンド、ステンレス、塩ビ、真鍮

【使用目的または効果】

歯科用石膏、埋没材の研削に用いる。

【使用方法等】

歯科技工用モデルトリマーに装着し、回転させて、
被研削物を押し付けて研削します。

【使用上の注意】

1) 使用注意

- ① 機器に確実に装着、使用すること。
- ② 使用前に予備回転を行い、異常な振動やカバー
等に接触のない事を確認すること。