


歯科材料09 歯科用研削材料 一般医療機器
歯科技工用アブレンブ研削器具 JMDNコード:70901000

キンパラカッター

【形状・構造等】

円盤状

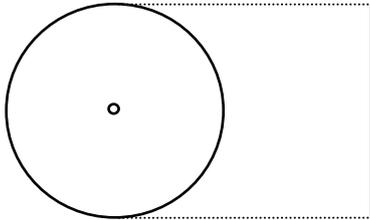

径(25mm)

厚(0.35mm)

成分

シリコンカーバイド、フェノール系接着剤、顔料、

【使用目的または効果】

歯科技工用の研削材で、歯科用金属のスプールカット等に用いる。

【使用方法等】

歯科技工用マンドレルに取り付け、歯科技工用回転機器に装着し、回転させて、被研削物にゆっくりと押し付けて、研削・研磨します。

【使用上の注意】

1) 使用注意

- ① 十分な強度のあるマンドレルに確実に装着し、最高使用回転数 10,000rpm 以下で使用すること。最高使用回転数を超えた場合には、破折してけがをする恐れがあるので、使用回転数を厳守すること。
- ② 使用前に予備回転を行い、振れがない事を確認すること。
- ③ 本材は頭部形状が大きく、破折することがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用はさけること。
- ④ 本材を使用する際には、目の損傷を防ぐために、保護眼鏡等を使用すること。
- ⑥ 本材は、口腔内には使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 デンタルエイド株式会社
ホームページ <http://www.dentalaid.co.jp>

製造業者 RECO-DENT INTERNATIONAL CO(台湾)