

器具機械49 医療用穿刺器、穿削器、穿孔器 一般医療機器
歯科用マンドレル JMDNコード:35170000

マンドレル

【形状・構造等】

頭部径5.0mm、長さ46.0mm
軸径 2.35mm



材質:スチール

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 デンタルエイド株式会社

製造業者 RECO-DENT INTERNATIONAL CO(台湾)

【使用目的または効果】

歯科技工用のマンドレルで、円盤状の各種歯科用研削材を装着して使用する。

【使用方法等】

円盤状の歯科用研削材を装着し、歯科技工用回転機器に装着し、回転させて、被研削物にゆっくりと押し付けて、研削、研磨します。

【使用上の注意】

- ① チヤックの奥まで確実に装着し、最高使用回転数(22,000rpm)以下で使用する。最高使用回転数を超えた場合には、破折してけがをする恐れがあるので、使用回転数を厳守すること。
ただし、装着物(研磨材等)の指示がある場合はその指示に従うこと
- ② 使用前に予備回転を行い、振れがない事を確認すること。
- ③ 形状が大きなものや、バランスの悪い研削材を使用すると、折れ曲がったりすることがあるので、無理な角度、過る度の加圧での使用はさけること。
- ④ 本材を使用する際には、目の損傷を防ぐために、保護眼鏡等を使用すること。